


CERAMICHE E AUSILI

IL BAGNO PER TUTTI

CERAMICHE E AUSILI

IL BAGNO SICURO

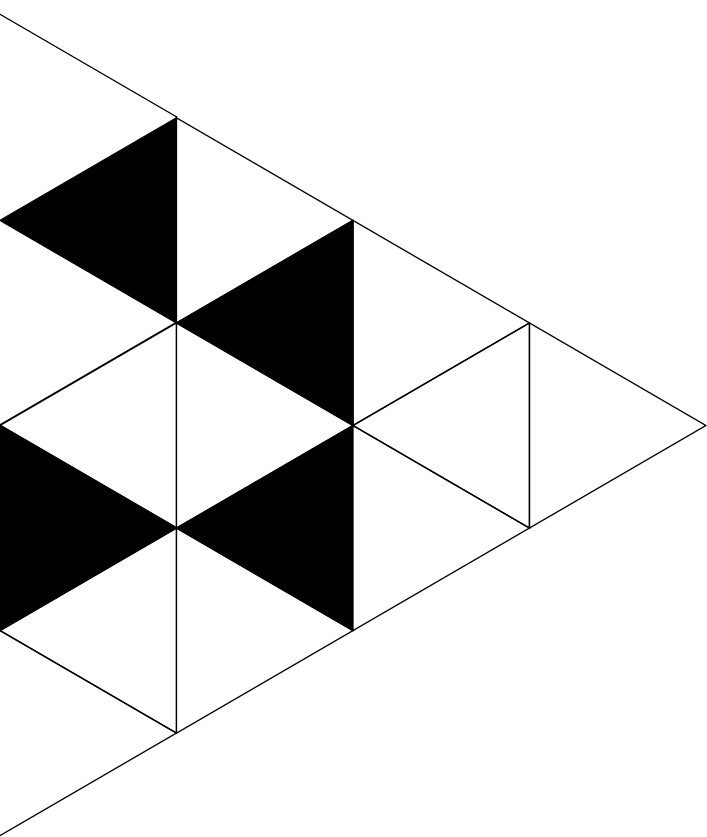

INDICE

p 2	NORMATIVE
p 4	ADEGUARE IL BAGNO
p 7	SPAZI DI MANOVRA
p 14	SANITARI IN CERAMICA GEA TRINNITY
p 18	SANITARI IN CERAMICA TERZA ETÀ TRINNITY
p 19	PIATTI DOCCIA TRINNITY
p 19	SEDILI PER WC TRINNITY
p 22	ACCESSORI TRINNITY
p 24	MANIGLIONI VERNICIATI TRINNITY
p 28	MANIGLIONI RIVESTITI TRINNITY
p 32	SPECCHI TRINNITY
p 33	SEDILI DOCCIA/VASCA TRINNITY
p 34	INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI AUSILI A PARETE TRINNITY
p 38	AGEVOLAZIONI FISCALI

NORMATIVE

Di seguito, lo stralcio del testo originale del **D.P.R. n° 503 del 24/07/1996**, riportante le normative di riferimento con le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. I testi integrali sono reperibili o scaricabili al sito del Ministero degli Interni, www.interno.gov.it alla voce legislazione disabili.

I riferimenti ai testi legislativi o a disposizioni di leggi qui richiamati sono puramente indicativi. Unico riferimento per la normativa applicabile è il testo di legge o altro provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del testo vigente.

Articolo 1.1 _ Le norme del presente regolamento sono volte a eliminare gli impedimenti comunemente definiti "barriere architettoniche".

Articolo 1.2 _ Per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzatura o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti, e per i sordi.

[...]

Articolo 1.6 _ Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236

Articolo 8.1 _ Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un WC e un lavabo per ogni nucleo di servizio installato.

[...]

D.M. 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nel Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. 23 giugno 1989, n. 145

Art. 1 - Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:

- 1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
- 2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
- 3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
- 4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Art. 2 - Definizioni

A) Per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

[...]

G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

H) Per visibilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio e incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale

[...]

Art. 4.1.6. - Servizi Igienici

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Deve essere garantito in particolare:

- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza ai rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici e docce a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.

[...]

Art. 8.1.6. - Servizi Igienici

Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra, l'accostamento laterale alla tazza WC, bidet, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale della sedia a ruote alla tazza WC e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm.
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:

- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
- i WC e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza WC o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio.

Qualora l'asse della tazza WC o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;

- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.

Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l'accessibilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza WC, posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3/4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.

Nei casi di adeguamento è consentita l'eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza WC e di definire sufficienti spazi di manovra. Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza WC e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.

Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di essi, anche senza l'accostamento laterale per la tazza WC e frontale per il lavabo.

[...]

Circolare ministeriale L.L.O.O. n° 1669, esplicativa della legge 13/89.

[...]

Per quanto riguarda la prima parte è importante sottolineare che, a decorrere dall'11/08/89 (primo giorno posteriore ai sei mesi dell'entrata in vigore della legge prevista dall'art. 1 comma 1), tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero la ristrutturazione di interi edifici siano anche quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche contenute nel Decreto Ministeriale dei lavori pubblici (D.P.R. 236 del 14/06/89). Restano pertanto esclusi dalla portata della disposizione in argomento i soli edifici pubblici per i quali continuano ad applicarsi le norme tecniche contenute nel D.P.R. 348/1978. Per quanto riguarda, in particolare, gli edifici privati aperti al pubblico (che pure erano stati oggetto di disciplina da parte del D.P.R. da ultimo citato) questi devono essere ritenuti compresi nell'ambito di applicazione della più recente L. 13/89.

ADEGUARE IL BAGNO

Nella necessità di creare per la persona le migliori condizioni di benessere in un periodo particolarmente delicato della sua vita, gli ausili per il bagno possono svolgere un ruolo decisamente di rilievo.

Come intervenire

Quando si affronta l'adeguamento del bagno per persone in condizioni a vario titolo di fragilità, gli obiettivi da raggiungere possono essere assai differenti e richiedere interventi diversi: rendere il locale più sicuro per ridurre il più possibile il rischio di incidenti, introdurre soluzioni funzionali per consentire un utilizzo autonomo anche in presenza di qualche invalidità, oppure facilitare i compiti di assistenza nelle operazioni di igiene personale nel caso di persone non autosufficienti.

Gli strumenti per intervenire sul bagno sono molteplici, alcuni poco invasivi, altri più radicali:

- sostituzione degli apparecchi sanitari: preferire un miscelatore a leva al posto di un rubinetto con le manopole, installare un water a una maggiore altezza rispetto a quello tradizionale, aggiungere maniglioni di sostegno, sostituire la vasca da bagno tradizionale con una vasca a sedere con sportello d'accesso, sono alcune delle possibilità per rendere meno faticose o più funzionali alcune attività attraverso la scelta della tipologia del sanitario più adatto alle capacità di utilizzo della persona;
- introduzione di accessori e ausili: dalla striscia di gomma antisdrucciolo da applicare al pavimento, al corrimano o al maniglione di sicurezza, alle cabine doccia con ante a due livelli e piatto doccia a filo pavimento, al seggiolino sollevatore incorporato nella vasca, fino ai dispositivi tecnologici che rilevano e segnalano situazioni di pericolo, sono moltissimi gli elementi che, correttamente inseriti nell'ambiente, riducono i pericoli, compensano alcune disabilità o alleviano il lavoro di chi assiste persone non autonome;
- interventi architettonici: nei casi di disabilità motoria più gravi, quando la persona anziana si muove in carrozzina oppure ha bisogno di utilizzare una comoda o addirittura una barella per lavarsi, l'adeguamento del locale può richiedere di reperire spazio in più o di cambiare la disposizione dei sanitari e allora diventa inevitabile intervenire drasticamente sulla struttura, modificando la forma del locale e la distribuzione dell'impianto sanitario.

Accorgimenti per il progetto di adeguamento del bagno

1. Se l'intervento viene proposto dai familiari, discuterne con l'interessato perché venga accettato con convinzione, presentandogli le modifiche come soluzioni per incrementare il comfort, la funzionabilità e la sicurezza del locale.
2. Cercare di realizzare soluzioni che non stravolgano l'ambiente e le abitudini consolidate.
3. Non trasformare il bagno domestico in un bagno "ospedaliero" che faccia sentire la persona malata e incapace.
4. Non farsi condizionare dagli stereotipi, come quello del bagno pubblico per disabili, perché fa riferimento a obblighi normativi e non a esigenze reali.
5. Individuare soluzioni personalizzate che scaturiscano esclusivamente dall'attenta analisi delle difficoltà nello svolgimento delle attività della persona.

Adeguare il bagno

Sono diverse le soluzioni pratiche per l'intervento di adeguamento relative ad alcuni dei problemi più comuni che si possono riscontrare nell'utilizzo del bagno durante l'invecchiamento. Le indichiamo raggruppandole in base a una schematizzazione legata al tipo di difficoltà funzionali che la persona che interagisce con il bagno può presentare:

- **difficoltà motorie:** si tengono in considerazione problemi di affaticamento e deambulazione, ma anche problematiche legate all'utilizzo di ausili, come la carrozzina, che necessitano di un ambiente su misura per consentire una certa autonomia all'utente;
- **difficoltà sensoriali:** vengono contemplate solamente le difficoltà che possono nascere da una diminuzione - e non dalla perdita completa - della capacità visiva o uditiva, che incidono quindi abbastanza marginalmente sulle azioni quotidiane che comportano un elevato grado di ripetitività e di abitudinarietà;
- **difficoltà cognitive:** le indicazioni sono finalizzate soprattutto a limitare problemi legati alla riduzione dell'attenzione o a comportamenti pericolosi che si possono riscontrare soprattutto nel caso di persone affette dalla malattia di Alzheimer.

In questa divisione adottata a fini pratici, molte indicazioni contenute nella sezione delle difficoltà motorie, possono essere risolutive anche nel caso di problemi legati alle difficoltà sensoriali e cognitive.

Le prescrizioni riportate sono conformi a quanto contenuto nella normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, DM 236/89), arricchite con numerosi suggerimenti in merito a problemi e difficoltà non analizzati dai documenti legislativi.

Il locale

• Difficoltà motorie

Si può rifare il pavimento del locale con piastrelle in grès antidrucciolo oppure incollare sopra il pavimento esistente un rivestimento in pvc o in vinile o soltanto alcune strisce in gomma nelle zone più pericolose o di percorrimento.

Installare corrimano lungo le pareti e maniglioni di sicurezza vicino ai sanitari per fornire un appoggio valido in caso di equilibrio incerto e problemi di affaticamento.

Prevedere un sistema di chiamata azionabile da terra. Un campanello d'allarme collegato a un cordoncino che corre lungo le pareti del bagno, all'interno di una serie di occhielli collocati a circa 60 cm da terra, può essere azionato tirando il cordone in un punto qualsiasi del locale. Se la porta d'accesso è a battente, predisporre l'apertura verso il corridoio e una serratura azionabile anche dall'esterno. In caso di caduta, si garantisce così a chi fornisce i soccorsi la possibilità di entrare nel bagno senza colpire la persona a terra con l'anta della porta.

Oltre alla sostituzione della vasca con una vasca a sedere o con la doccia, è possibile rimuovere il bidet, sostituendolo con una doccetta per il wc o con un water/bidet.

Sostituire la porta di accesso a battente con una scorrevole, più facile da manovrare per chi si muove in carrozzina.

• Difficoltà sensoriali

Se la persona che ha problemi di equilibrio ha anche limitazioni visive, scegliere i corrimano e i maniglioni di sicurezza di colore a contrasto con quelli delle pareti o quelli con inserti fotoluminescenti perché possano essere individuati immediatamente in caso di pericolo. Per facilitare l'individuazione dei singoli sanitari, realizzare campi di piastrelle di colore a contrasto sulla parete posteriore.

• Difficoltà cognitive

Non inserire nel bagno specchi o superfici molto lucide o riflettenti che possono creare effetti allucinatori, con reazioni aggressive se la persona anziana soffre di problemi di dispercezione ambientale

Il lavabo

• Difficoltà motorie

Installare uno o due maniglioni ribaltabili o a bandiera a lato del lavabo, che possono fungere anche da portasciugamani.

Utilizzare il lavabo da seduti, con l'ausilio di una seggiolina o di uno sgabello.

Scegliere un lavabo del tipo a mensola, senza colonna e libero da impedimenti nella parte inferiore, con le tubature accostate alla parete o incassate nella muratura per evitare scottature o escoriazioni alle gambe.

- Preferire un modello di lavabo con catino poco profondo, bordo anteriore ampio per un confortevole appoggio degli avambracci e top incorporato, per tenere a portata di mano i prodotti per la pulizia personale.

Completare la zona lavabo con uno specchio grande, che arrivi fino al bordo del lavabo, mensole ad altezza raggiungibile e cassettiere sottopiano o su rotelle.

Installare un rubinetto con doccetta estraibile, utile per raggiungere braccia e testa e lavarsi i capelli nel lavabo. Per lo shampoo, se fatto da seduti e con l'aiuto di terzi, può risultare utile l'adozione di una vaschetta lavacapelli in plastica.

In presenza di limitazioni agli arti superiori, scegliere la rubinetteria con comando a leva. Se si preferisce mantenere i rubinetti a manopola, facilitare la presa con l'applicazione di supporti ergonomici.

• Difficoltà sensoriali

Scegliere comandi del rubinetto del lavabo ben individuabili, con una colorazione che indichi chiaramente il rubinetto dell'acqua calda e di quella fredda.

- Illuminare abbondantemente la zona del lavabo, con luce diretta.

• Difficoltà cognitive

Provare ad adottare un rubinetto a stella di vecchia foggia, oggetto conosciuto che stimola la memoria procedurale nelle attività funzionali.

- Evitare il pericolo di allagamenti grazie all'utilizzo di un rubinetto automatico temporizzato o elettronico e all'adozione di rilevatori anti-allagamento che interrompono l'erogazione dell'acqua in caso di grosse fuoriuscite sul pavimento.
- Per evitare scottature, installare un miscelatore termostatico centralizzato che consenta di fissare la temperatura massima di erogazione dell'acqua del bagno.

ADEGUARE IL BAGNO

- Al fine che i prodotti e gli oggetti per l'igiene personale e i medicinali non vengano utilizzati in modo improprio senza sorveglianza, custodirli in contenitori non accessibili, chiusi con una serratura.

Il water e il bidet

• Difficoltà motorie

Adottare una tavoletta wc imbottita per evitare che il cattivo controllo del trasferimento possa provocare contusioni sui glutei della persona anziana a rischio decubito.

La comoda va posizionata sopra il vaso, quindi il wc deve avere il bordo anteriore ad almeno 70 cm dal muro e la seduta a 40-42 cm da terra per consentire l'inserimento della comoda.

Predisporre a lato del water una doccetta a telefono, oppure adottare un wc-bidet dotato di ugelli d'acqua direzionabili per la pulizia personale.

Posizionare il comando dello scarico in un punto raggiungibile (su parete a lato wc); preferire modelli con pulsanti dalla superficie ampia.

• Difficoltà sensoriali

Scegliere il sedile e il coperchio di colore a contrasto con la ceramica bianca, per rendere il water facilmente individuabile.

• Difficoltà cognitive

Adottare un rialza water con braccioli o dei maniglioni, che la facciano sentire più sicura e allevino la sensazione di caduta nel vuoto.

Quando la persona non è in grado di distinguere il wc dal bidet, nascondere il bidet con un telo in modo che non venga utilizzato in modo improprio.

La vasca da bagno

• Difficoltà motorie

Installare un maniglione a muro e inserire un tappetino in gomma o delle strisce adesive antisdrucciolo.

Inserire una sedia da bagno o agganciare ai bordi della vasca un seggiolino o una panchetta per evitare di sedersi direttamente sul fondo della vasca e compiere poi un grave sforzo per risalire. Se non si vuole rinunciare all'immersione nell'acqua, installare una vasca dotata di sedile a movimento elettrico.

Vasche a sedere con sportello, di facile accesso, ridotto ingombro e di massima sicurezza per l'utente.

Le migliori vasche sul mercato hanno maniglie di sostegno, doppio scarico per accelerare lo svuotamento, sportello in acciaio a garanzia della tenuta nel tempo.

Per facilitare il trasferimento, prevedere uno spazio di accostamento alla vasca, installare un maniglione a muro per creare un punto di appoggio e utilizzare un seggiolino. Il modello a panchetta è quello più indicato perché rimane a livello dei bordi della vasca, ma per lavarsi diventa necessaria la doccia a telefono.

• Difficoltà sensoriali

Se necessari scegliere il seggiolino e gli appoggi a muro di colore contrastante con il rivestimento del locale e con la ceramica bianca del sanitario.

• Difficoltà cognitive

Installare un maniglione per l'appoggio, un seggiolino e una tenda che limiti il perimetro della vasca, o meglio utilizzare vasche a sedere con sportello d'accesso.

La doccia

• Difficoltà motorie

Adottare un box doccia a filo pavimento ed eventualmente incollare attorno ad esso un profilo di gomma morbido per il contenimento della fuoriuscita dell'acqua nel locale.

Installare un maniglione a muro per un appoggio di sicurezza a chi si lava in piedi e ha poco equilibrio. Applicare strisce antisdrucciolo al pavimento per rendere il fondo della doccia meno scivoloso. Incassare nel muro i sostegni per il sapone o altri detergenti per evitare pericolose sporgenze.

Per lavarsi da seduti, inserire una sedia da bagno o installare un seggiolino doccia di tipo fisso o ribaltabile, sulla parete contigua a quella dove è installato l'erogatore.

Utilizzare un box doccia con pareti alte solo un metro o con ante apribili a 2 livelli per consentire a un eventuale assistente di aiutare senza bagnarsi.

• Difficoltà sensoriali

Preferire la doccia a filo pavimento - meglio se in colore a contrasto con il resto del pavimento. Scegliere il seggiolino e gli appoggi a muro di colore contrastante con il rivestimento della parete, più facilmente riconoscibili.


• Difficoltà cognitive

Per il contenimento dell'acqua della doccia utilizzare tende di plastica al posto di box con pareti vetrate, che possono non essere individuate o creare riflessi scatenanti reazioni violente.


SPAZI DI MANOVRA

Spazi minimi di manovra necessari agli spostamenti su sedia a rotelle


Quote disegni in cm

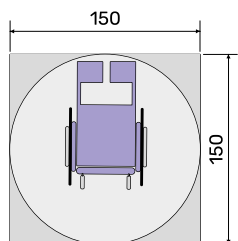


A. Rotazione di 360°
Cambiamento di direzione

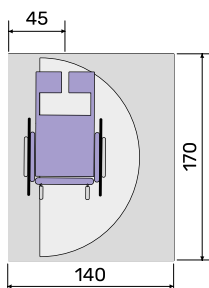


B. Rotazione di 180°
Inversione di direzione

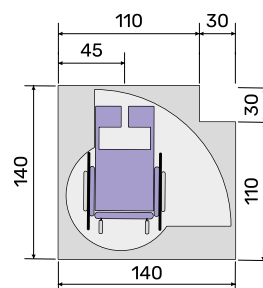

C. Rotazione di 90°

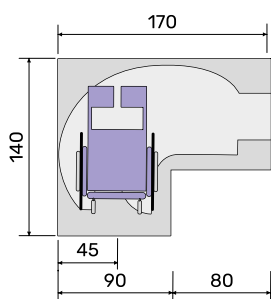


D. Svolta di 90°

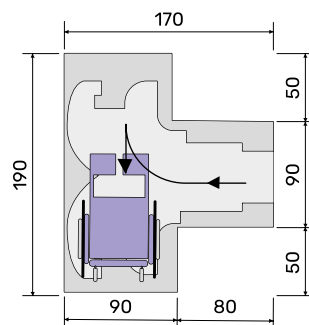


E. Manovra combinata


Spazi minimi di manovra combinata ammissibili nei casi di adeguamento e ove non sia possibile rispettare gli spazi necessari

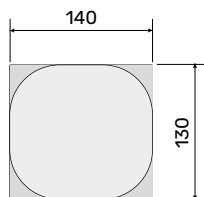


F. Rotazione di 360°

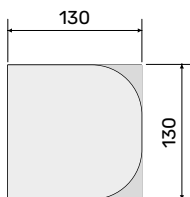


G. Rotazione di 180°

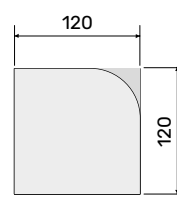


H. Rotazione di 90°

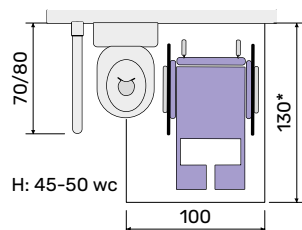

Vaso e bidet:
accostamento laterale

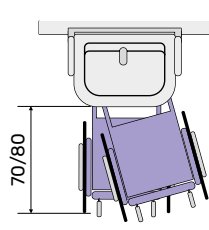

Lavabo:
accostamento frontale

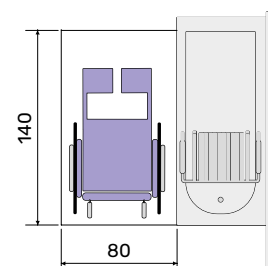


Vasca da bagno:
accostamento laterale

SPAZI DI MANOVRA

Trasferimento laterale per accostamento a piatto doccia o vasca


Quote disegni in cm

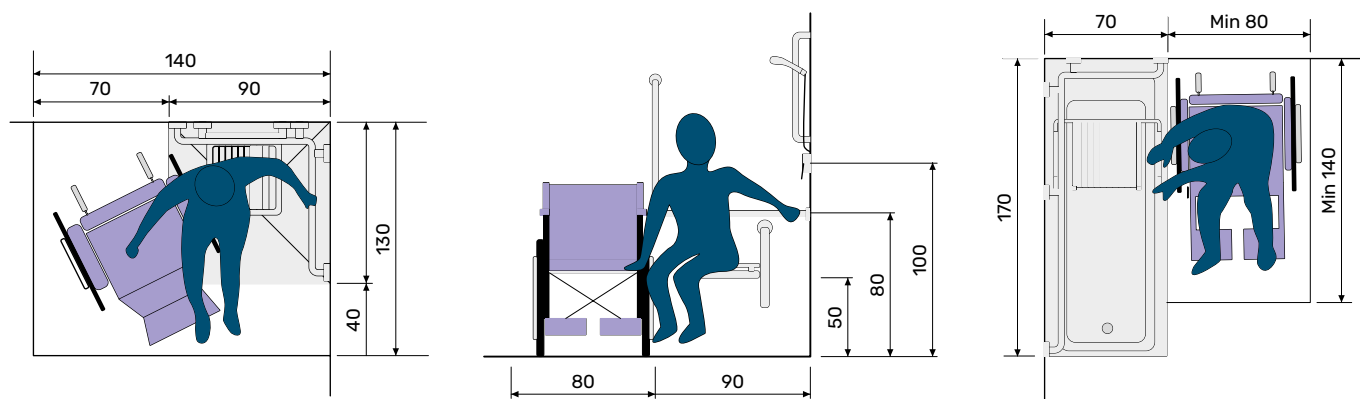


Passaggio

Passaggio a 2 vie

Cambio di direzione a T o a 180°



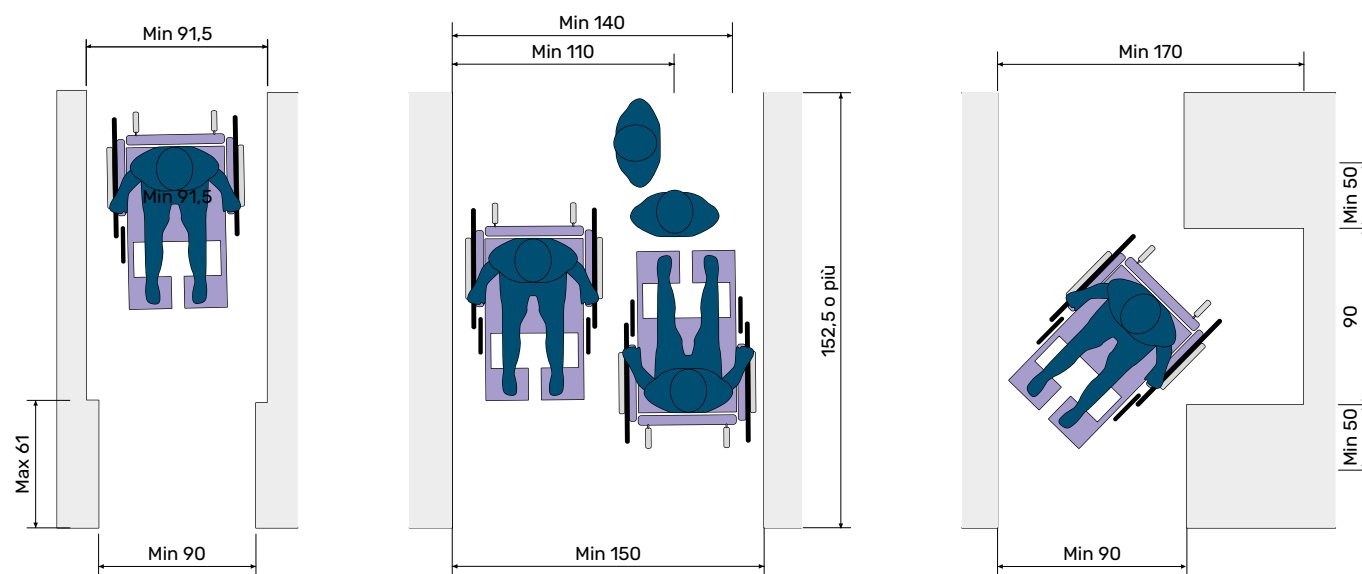


Trasferimento frontale

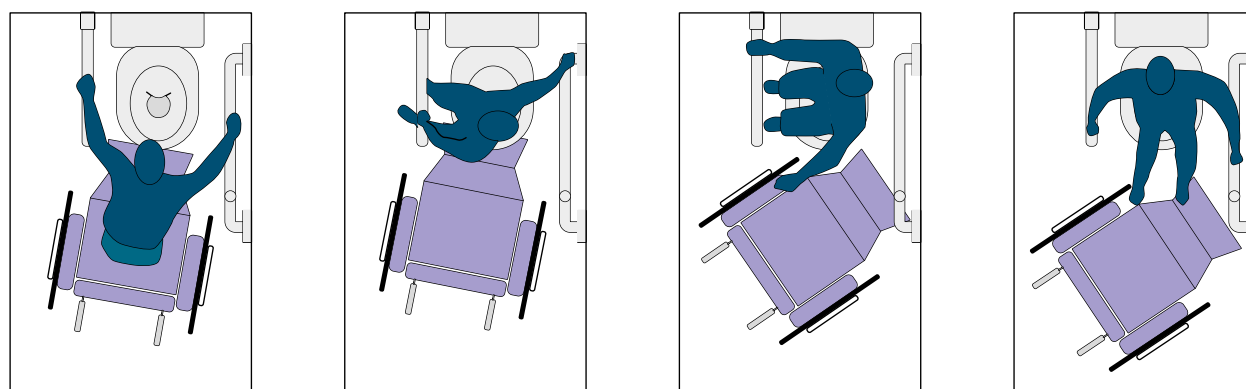


Trasferimento laterale destro

Quote disegni in cm

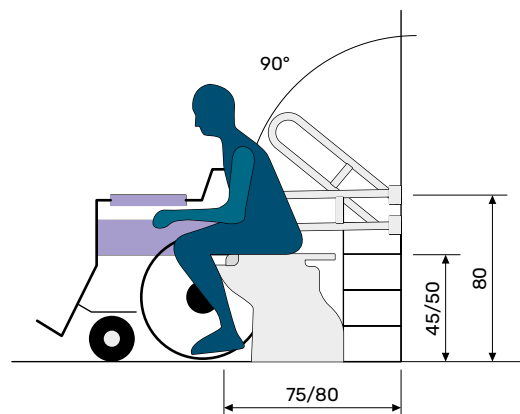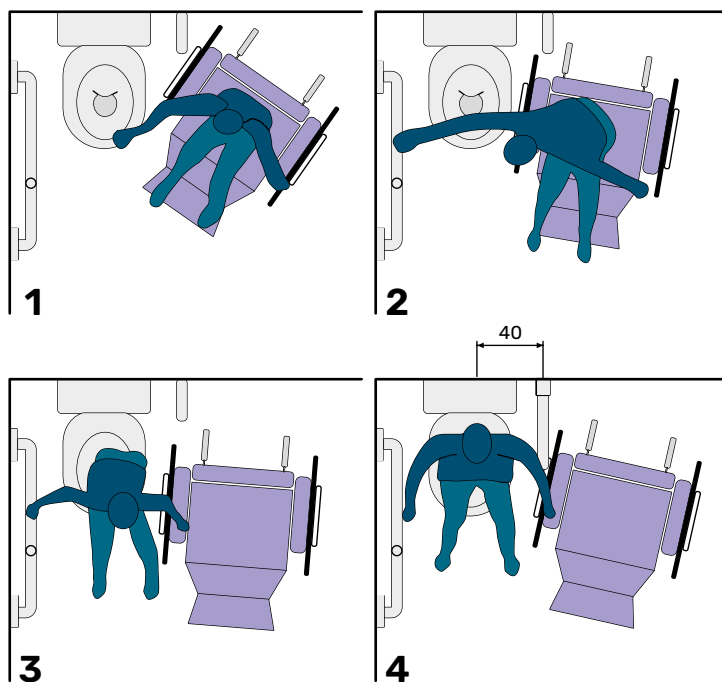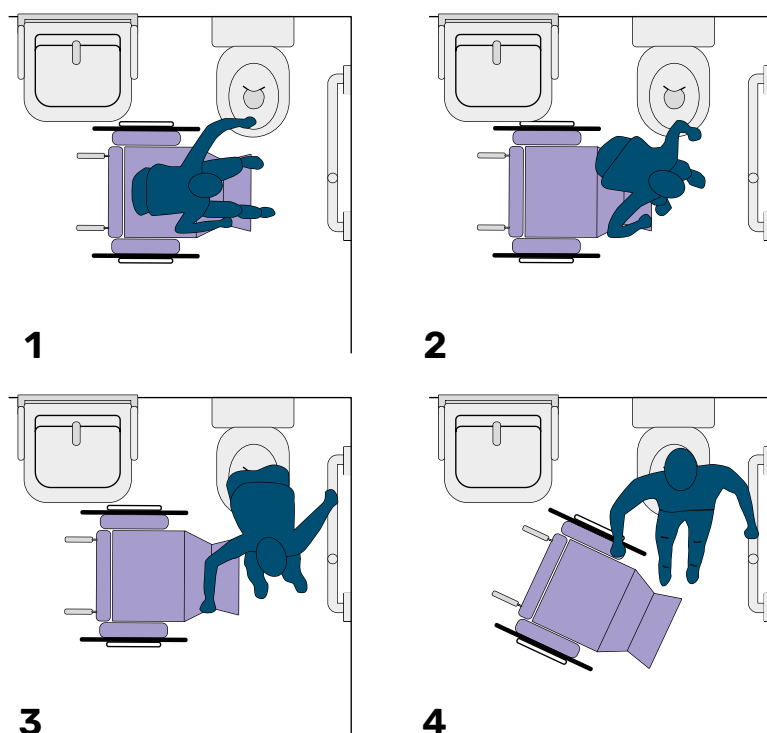**Trasferimento obliquo sinistro**

BAGNO TIPO "A"
AMBIENTE PUBBLICO

Quote disegni in mm

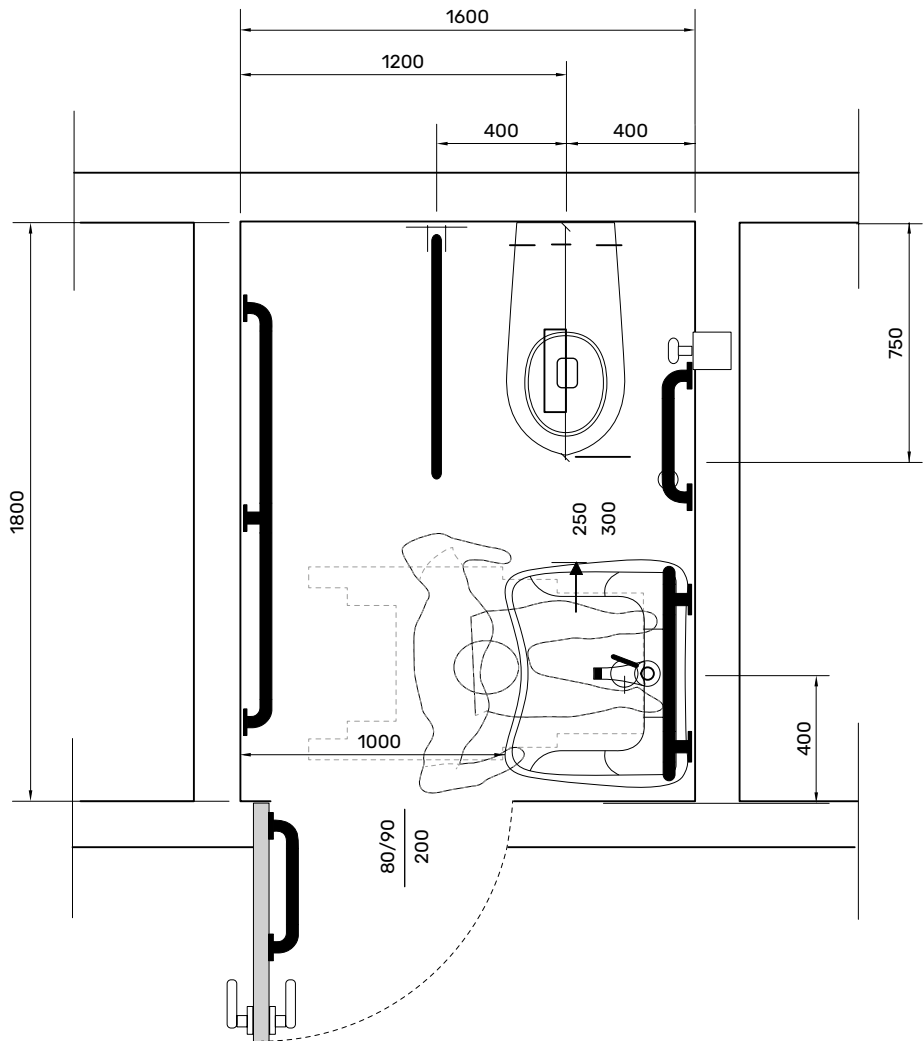


Articolo	Descrizione
TR0400286	GEA lavabo ergonomico 60x51 cm
TR0400306	Coppia mensole lavabo GEA fisse
TR0400290	GEA wc/bidet aperto sospeso allungato 75x35,5 cm
TR0400311	Sifone flessibile con piletta e tubo di scarico per lavabo
TR0400319	Corrimano 150 cm con rinforzo centrale - verniciato bianco
TR0400315	Maniglione lineare 60 cm - verniciato bianco
TR0400321	Impugnatura ribaltabile con rinforzo 80 cm - verniciata bianco
TR0400312	Maniglione lineare 30 cm - verniciato bianco


BAGNO TIPO "A" AMBIENTE PUBBLICO

Quote disegni in mm


Parete SX

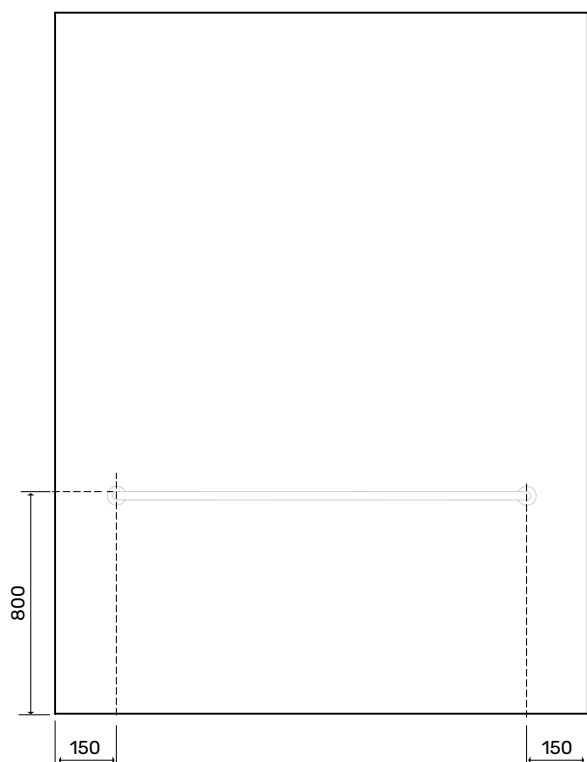


Parete di fondo

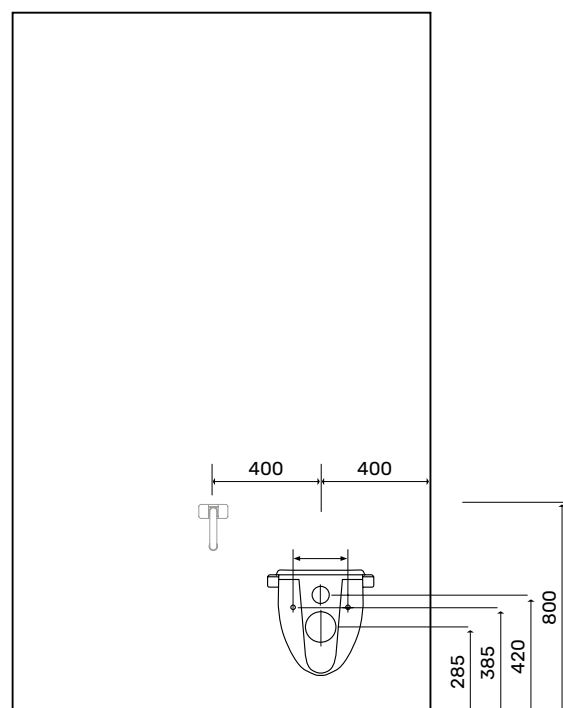

Parete DX

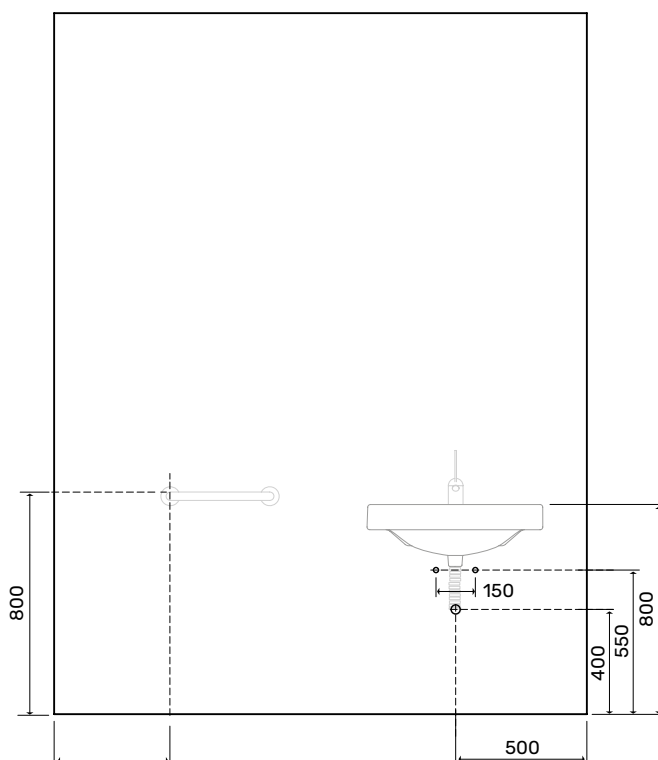


Parete lato porta

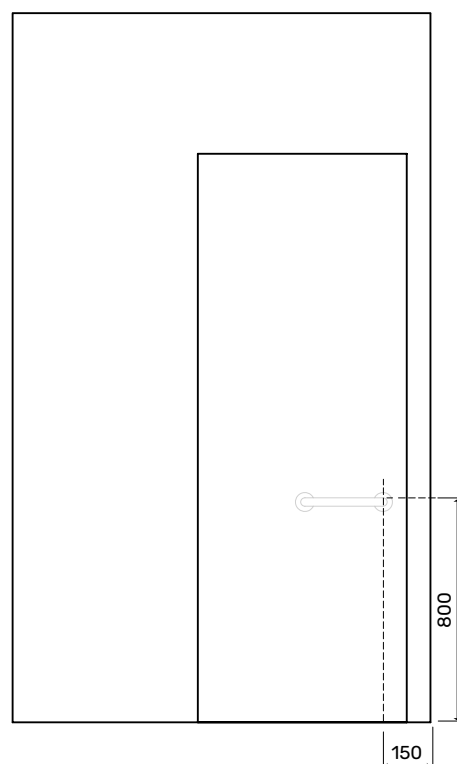

BAGNO TIPO "B" AMBIENTE PUBBLICO

Quote disegni in mm

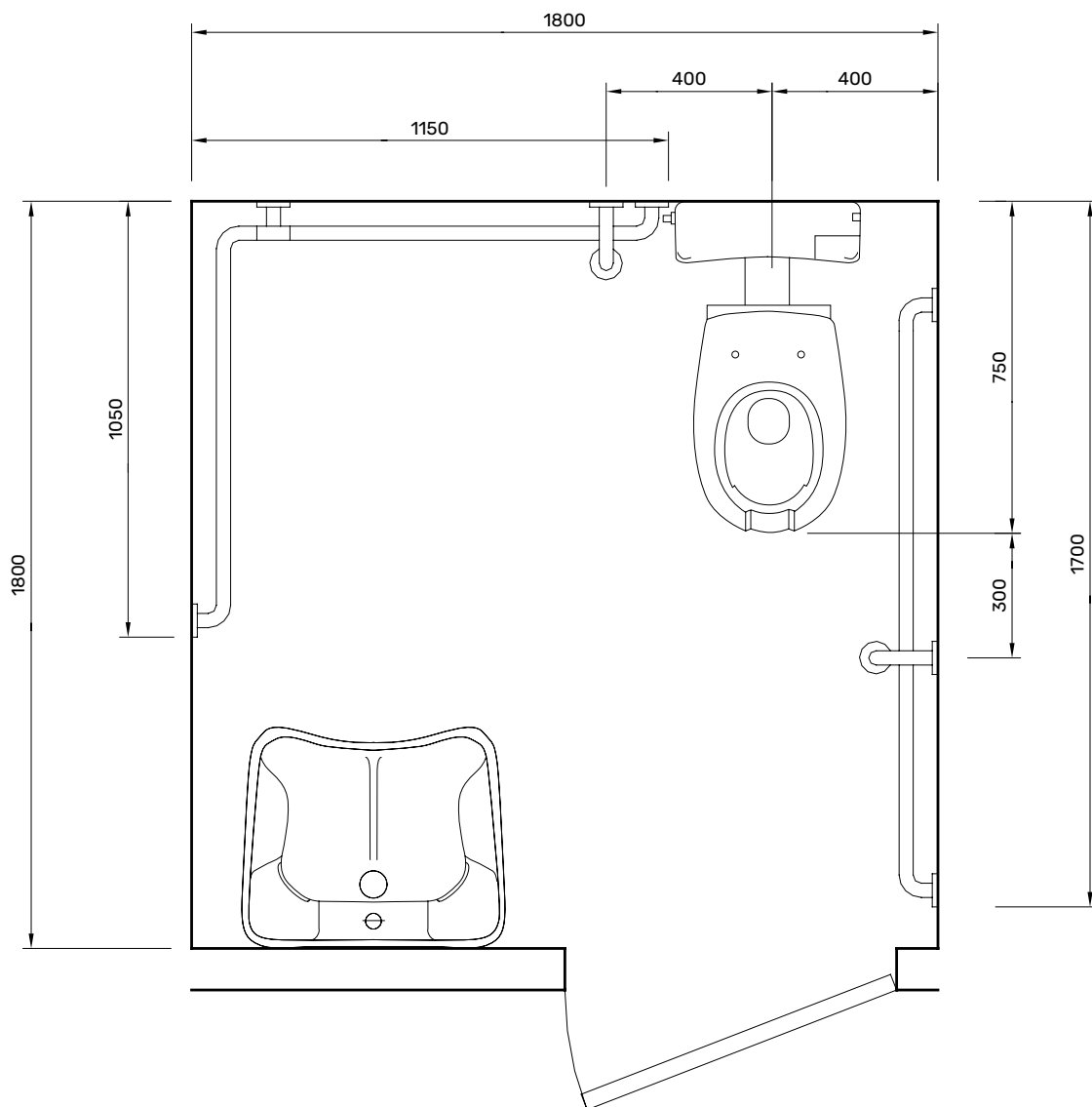


Articolo	Descrizione
TR0400288	GEA lavabo ergonomico 70x57 cm
TR0400309	Coppia mensole di sostegno per lavabo GEA reclinabili
TR0400287	GEA wc/bidet H 50 cm aperto scarico pavimento 59x39 cm
TR0400311	Sifone flessibile con piletta e tubo di scarico per lavabo
TR0400366	Maniglione lineare 120 cm - rivestito con guaina antibatterica bianca
TR0400373	Corrimano verticale pavimento/parete H 140 cm - rivestito con guaina antibatterica bianca
TR0400365	Maniglione lineare 90 cm - rivestito con guaina antibatterica bianca


BAGNO TIPO "B" AMBIENTE PUBBLICO

Quote disegni in mm


Parete SX

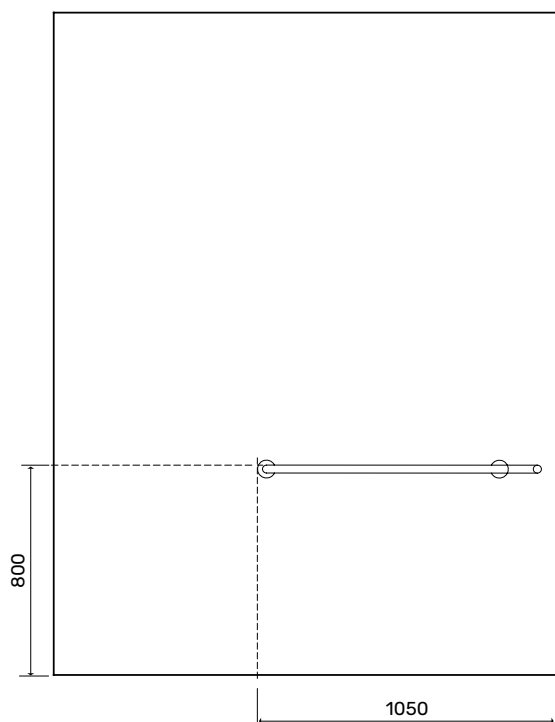


Parete di fondo

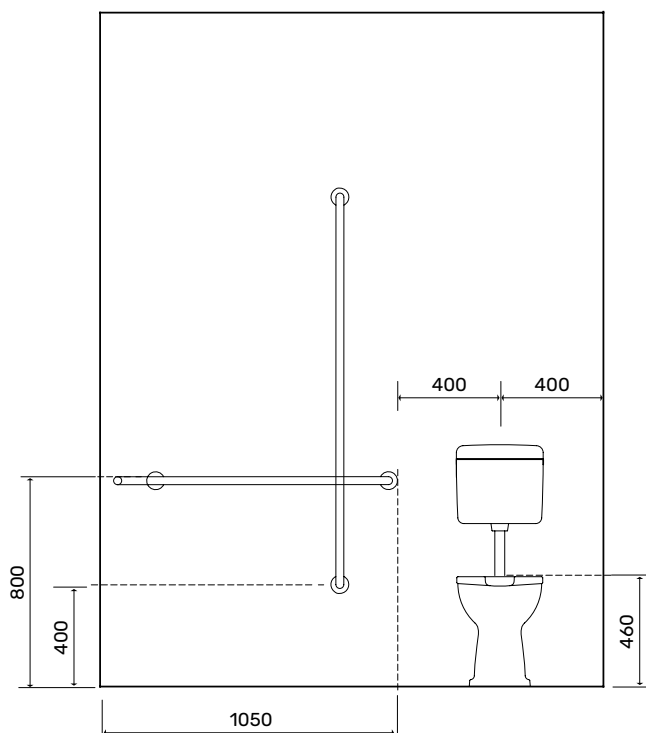

Parete DX

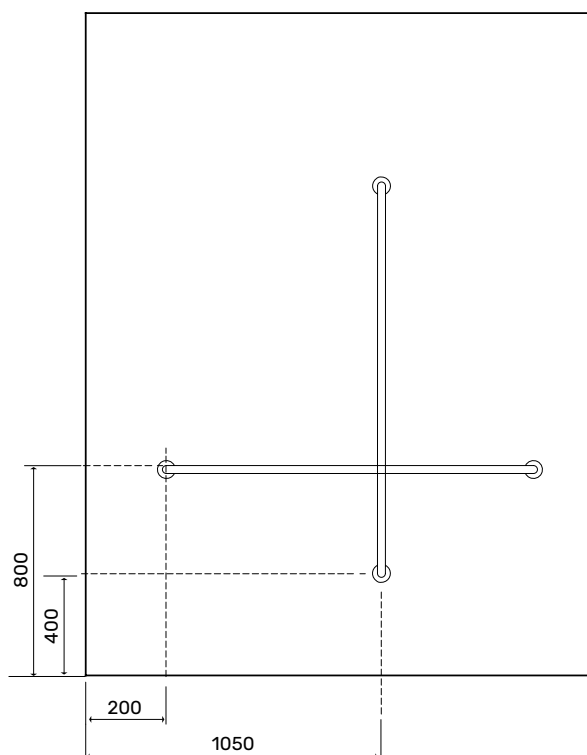


Parete lato porta

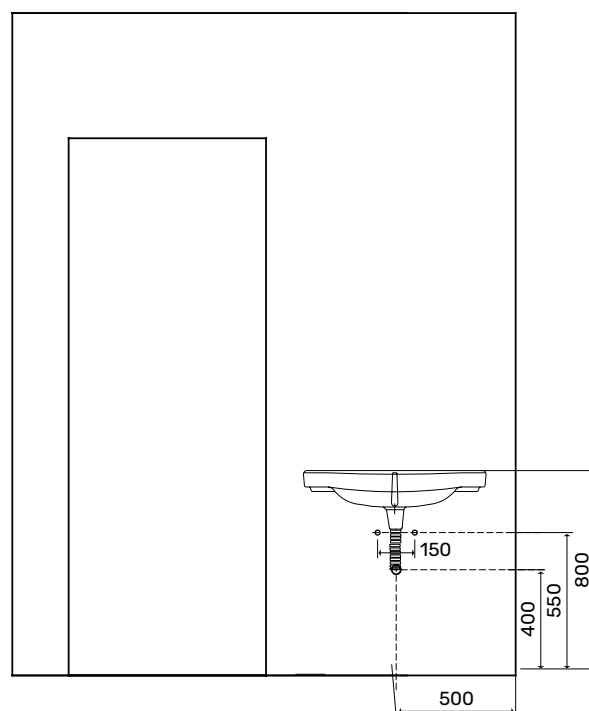


SANITARI IN CERAMICA GEA TRINNITY

Quote disegni in mm

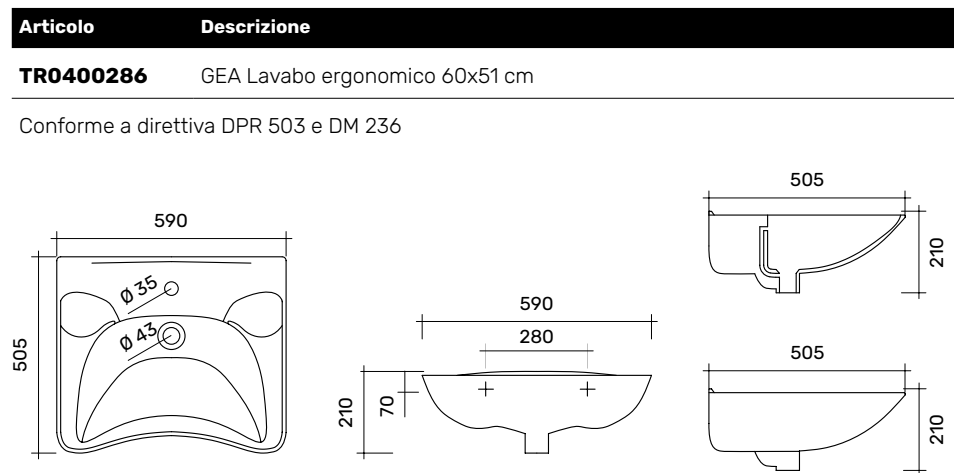

Accessori	Descrizione
TR0400306	Coppia mensole di sostegno per lavabo GEA 60x51 fisse
TR0400307	Coppia mensole di sostegno per lavabo GEA 60x51 reclinabili meccanicamente
TR0400308	Coppia mensole di sostegno per lavabo GEA 60x51 reclinabili pneumaticamente

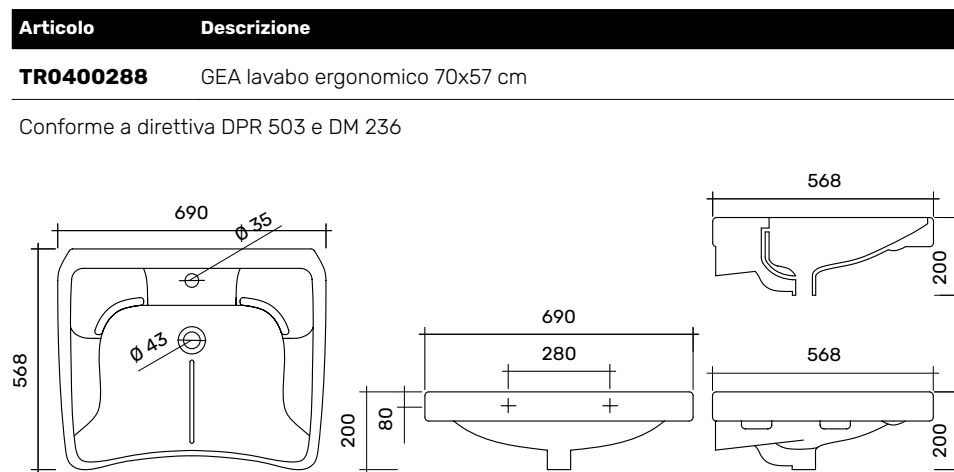


Accessori	Descrizione
TR0400310	Coppia mensole di sostegno per lavabo GEA 70x57 fisse
TR0400309	Coppia mensole di sostegno per lavabo GEA 70x57 reclinabili meccanicamente
TR0400437	Coppia mensole di sostegno per lavabo GEA 70x57 reclinabili pneumaticamente

Quote disegni in mm



Articolo	Descrizione
TR0400294	GEA wc/bidet aperto scarico a parete/pavimento 55x35,5 cm

Conforme a direttiva DPR 503 e DM 236 - Sedili acquistabili separatamente.

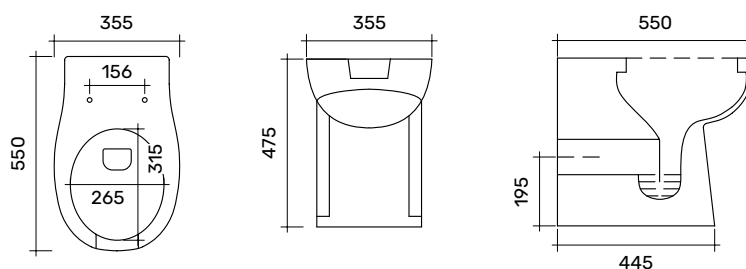


Accessori	Descrizione
TR0400299	Sedile per wc con apertura frontale - polipropilene bianco
TR0400300	Sedile per wc con apertura frontale - resina poliesteri bianco
TR0400304	Sedile copribordo per wc - polipropilene bianco



Articolo	Descrizione
TR0400293	GEA wc/bidet aperto monoblocco scarico a parete/pavimento con cassetta e batteria 75x35,5 cm


Conforme a direttiva DPR 503 e DM 236 - Sedili acquistabili separatamente.

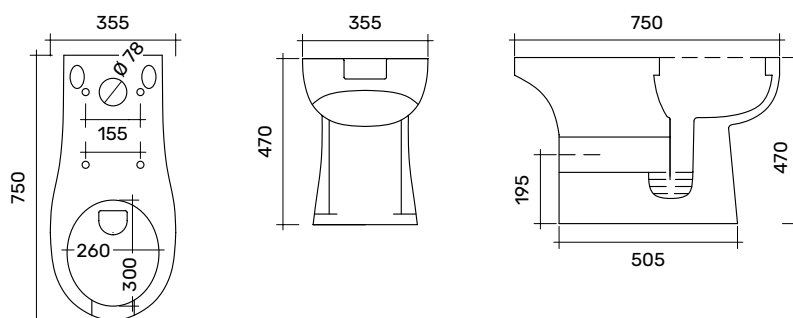


Accessori	Descrizione
TR0400299	Sedile per wc con apertura frontale - polipropilene bianco
TR0400300	Sedile per wc con apertura frontale - resina poliesteri bianco
TR0400304	Sedile copribordo per wc - polipropilene bianco

SANITARI IN CERAMICA GEA TRINNITY

Quote disegni in mm

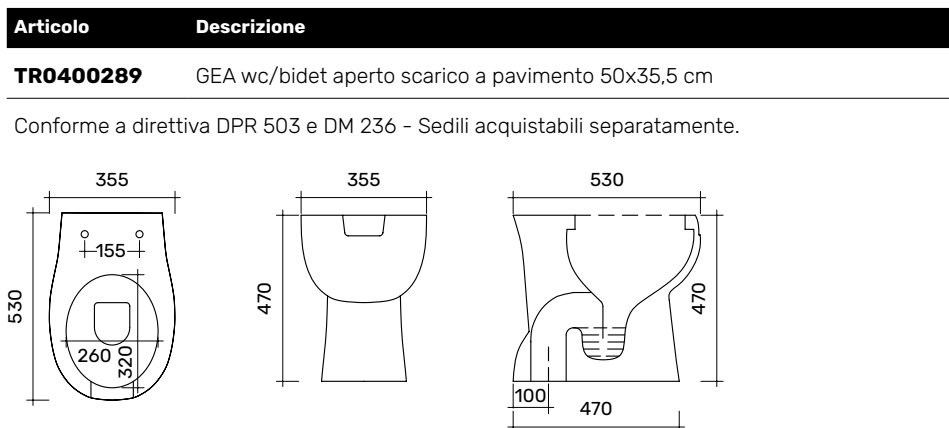


Accessori	Descrizione
TR0400299	Sedile per wc con apertura frontale - polipropilene bianco
TR0400300	Sedile per wc con apertura frontale - resina poliesteri bianco
TR0400304	Sedile copribordo per wc - polipropilene bianco

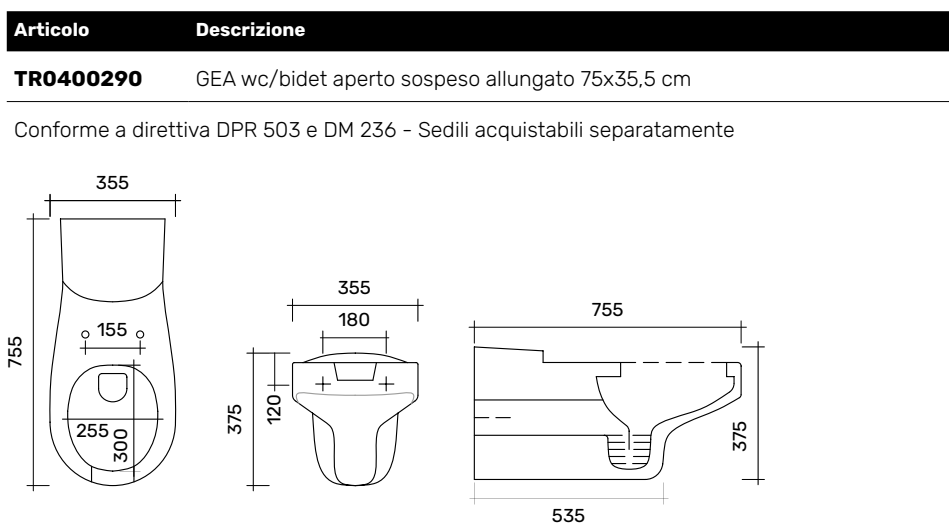


Accessori	Descrizione
TR0400299	Sedile per wc con apertura frontale - polipropilene bianco
TR0400300	Sedile per wc con apertura frontale - resina poliesteri bianco
TR0400304	Sedile copribordo per wc - polipropilene bianco

Quote disegni in mm

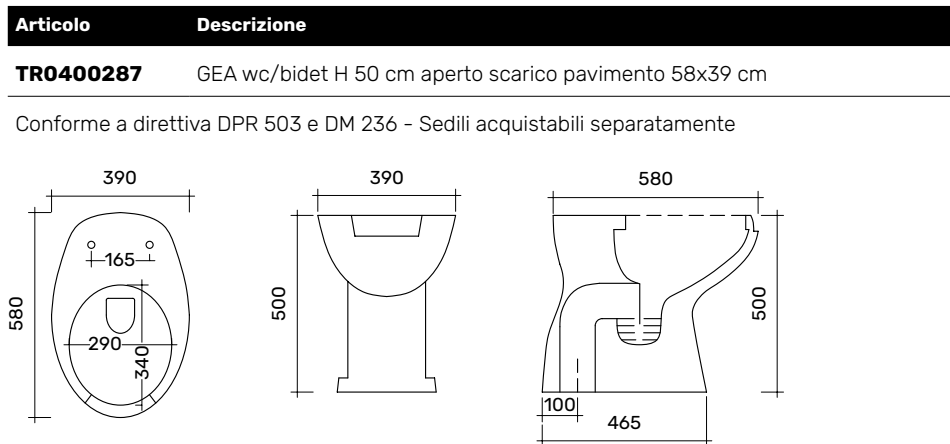

Accessori	Descrizione
TR0400302	Sedile per wc con apertura frontale - polipropilene bianco
TR0400303	Sedile per wc con apertura frontale - resina poliesteri bianco
TR0400305	Copribordo per wc - polipropilene bianco

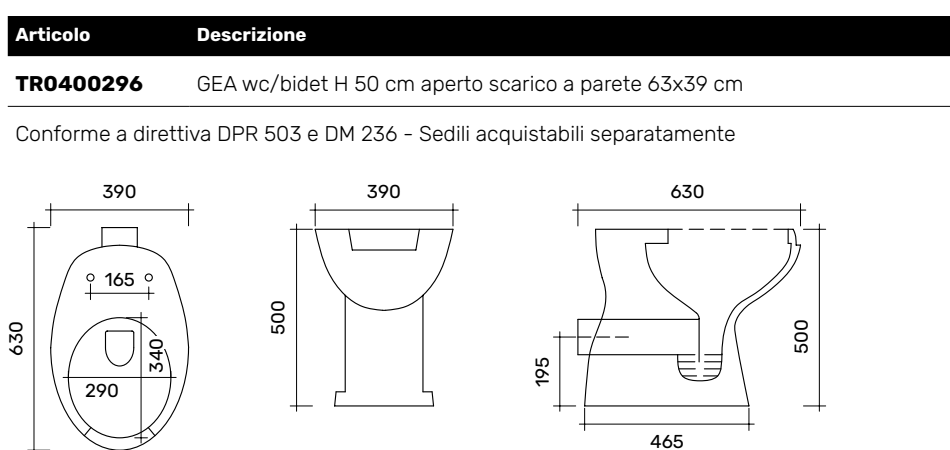

Accessori	Descrizione
TR0400302	Sedile per wc con apertura frontale - polipropilene bianco
TR0400303	Sedile per wc con apertura frontale - resina poliesteri bianco
TR0400305	Copribordo per wc - polipropilene bianco

SANITARI IN CERAMICA GEA TRINNITY



Articolo	Descrizione
TR0400295	GEA wc/bidet aperto sospeso 55x39 cm
Conforme a direttiva DPR 503 e DM 236 - Sedili acquistabili separatamente	
Accessori	Descrizione
TR0400302	Sedile per wc con apertura frontale - polipropilene bianco
TR0400303	Sedile per wc con apertura frontale - resina poliesteri bianco
TR0400305	Copribordo per wc - polipropilene bianco

SANITARI IN CERAMICA TERZA ETÀ TRINNITY



Articolo	Descrizione
TR0400291	TERZA ETÀ bidet a pavimento
Conforme a norma EN 14528	




Articolo	Descrizione
TR0400292	TERZA ETÀ wc scarico pavimento
Conforme a direttiva DPR 503 e DM 236 - Sedili acquistabili separatamente	
Accessori	Descrizione
TR0400301	Sedile per wc senza apertura frontale - poliesteri bianco

PIATTI DOCCIA TRINNITY


Quote disegni in mm



Articolo	Descrizione
TR0400394	Piatto doccia filo pavimento in VTR 80x80 cm - H 110 cm completo di piletta

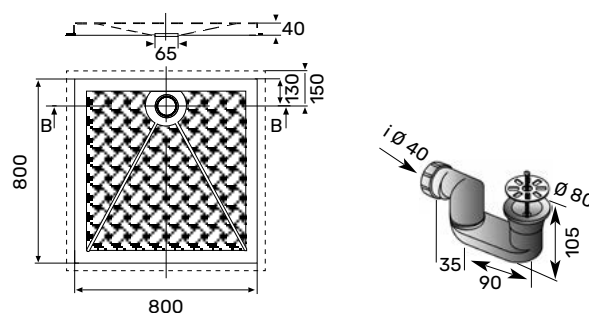


Articolo	Descrizione
TR0400395	Piatto doccia filo pavimento in VTR 90x90 cm - H 110 cm completo di piletta

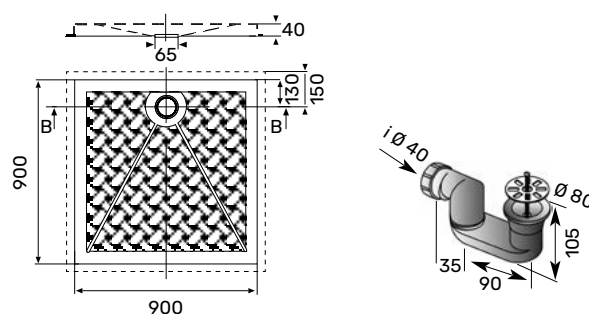

SEDILI PER WC TRINNITY



Articolo	Descrizione
TR0400299	Sedile per wc con apertura frontale per TR0400289/290/293/294 polipropilene bianco

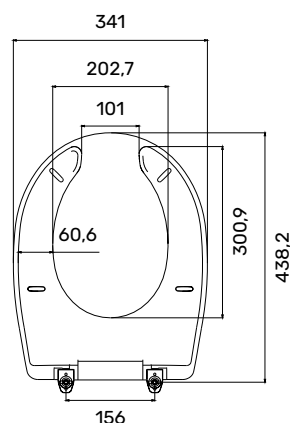


SEDILI PER WC TRINNITY


Quote disegni in mm




Articolo	Descrizione
TR0400300	Sedile per wc con apertura frontale per TR0400289/290/293/294 resina poliestere bianco

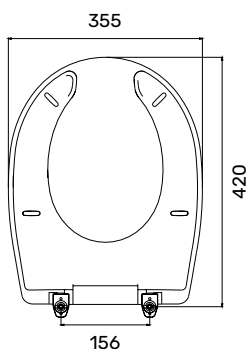

Articolo	Descrizione
TR0400302	Sedile per wc con apertura frontale per TR0400287/295/296 polipropilene bianco

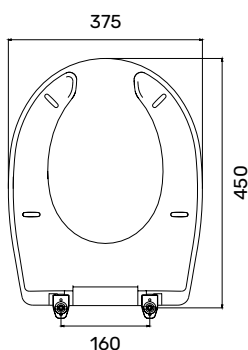


Articolo	Descrizione
TR0400303	Sedile per wc con apertura frontale per TR0400287/295/296 resina poliestere bianco

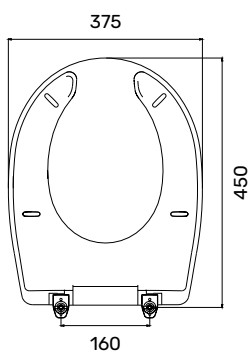


Quote disegni in mm




Articolo	Descrizione
TR0400301	Sedile per wc senza apertura frontale per TR0400292 - resina poliestere bianco

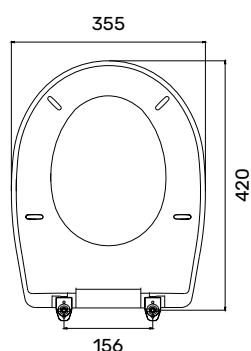

Articolo	Descrizione
TR0400304	Sedile copribordo per wc per TR0400289/290/293/294 - polipropilene bianco

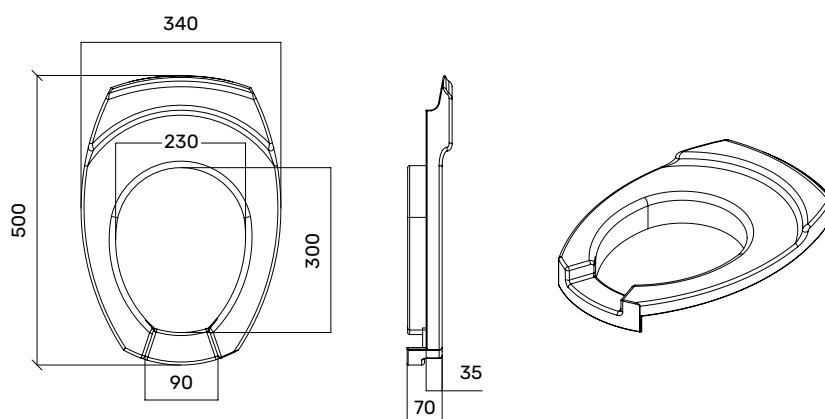


Articolo	Descrizione
TR0400305	Copribordo per wc per TR0400287/295/296 - polipropilene bianco


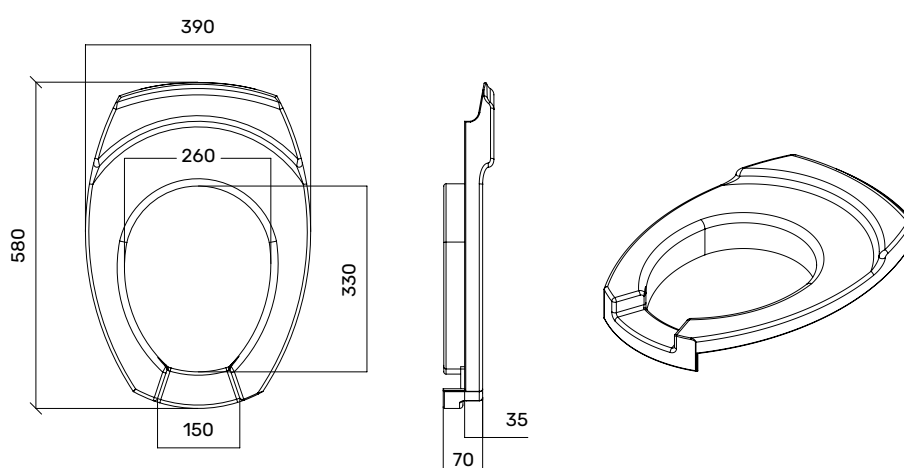


ACCESSORI TRINNITY



Quote disegni in mm

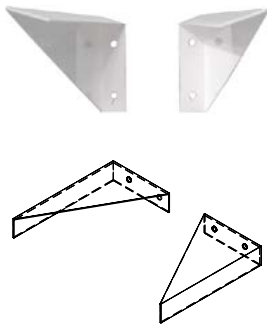


Articolo	Descrizione
TR0400306	Coppia mensole di sostegno per lavabo GEA 60x51 fisse

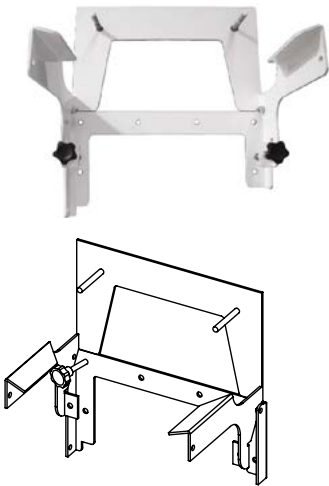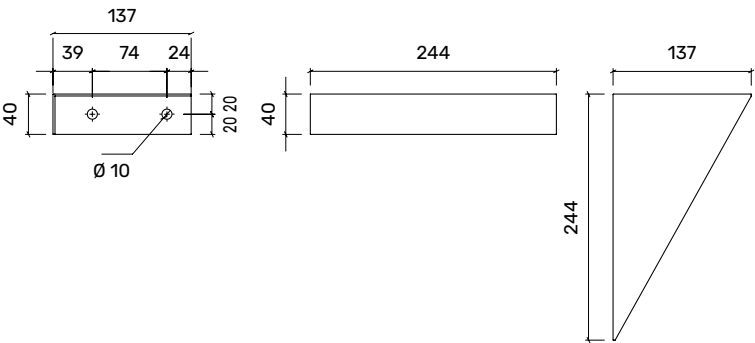


Articolo	Descrizione
TR0400307	Coppia mensole di sostegno per lavabo GEA 60x51 reclinabili meccanicamente

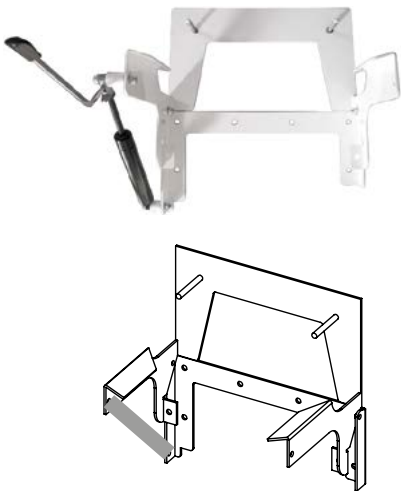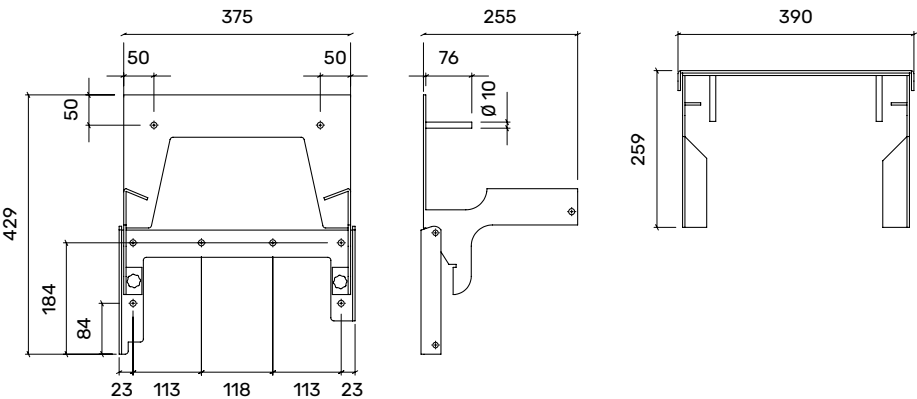

Articolo	Descrizione
TR0400308	Coppia mensole di sostegno per lavabo GEA 60x51 reclinabili pneumaticamente


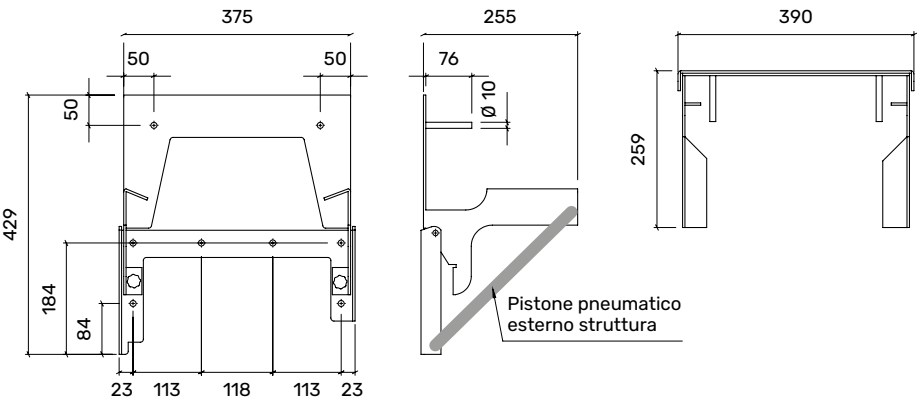


Quote disegni in mm

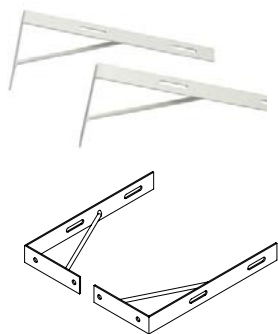



Articolo	Descrizione
----------	-------------

TR0400310	Coppia mensole di sostegno per lavabo GEA 70x57 fisse
------------------	---

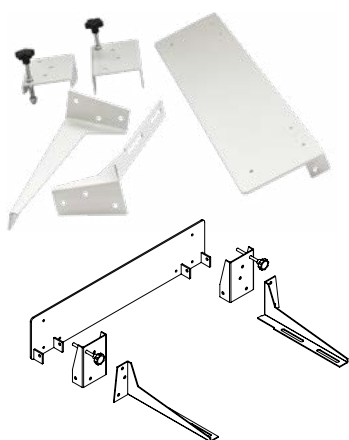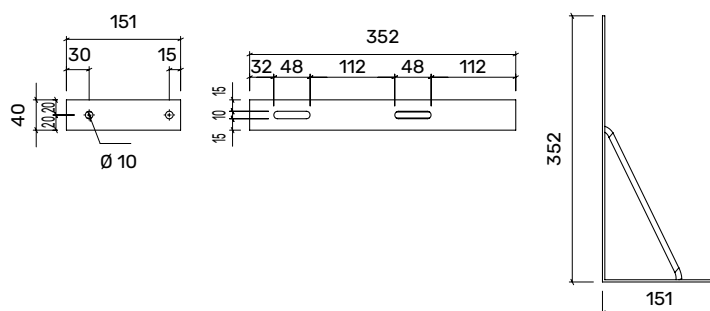


Articolo	Descrizione
----------	-------------

TR0400309	Coppia mensole di sostegno per lavabo GEA 70x57 reclinabili meccanicamente
------------------	--

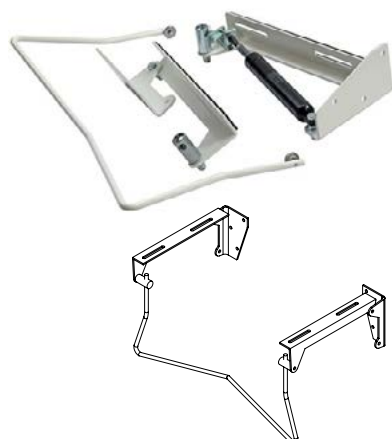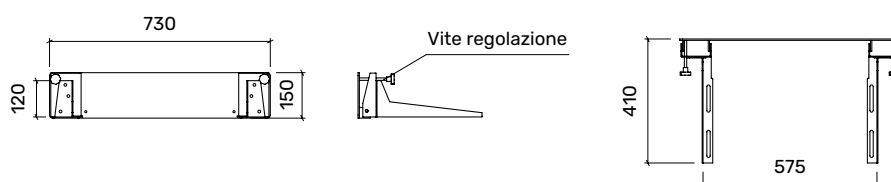


Articolo	Descrizione
----------	-------------

TR0400437	Coppia mensole di sostegno per lavabo GEA 70x57 reclinabili pneumaticamente
------------------	---

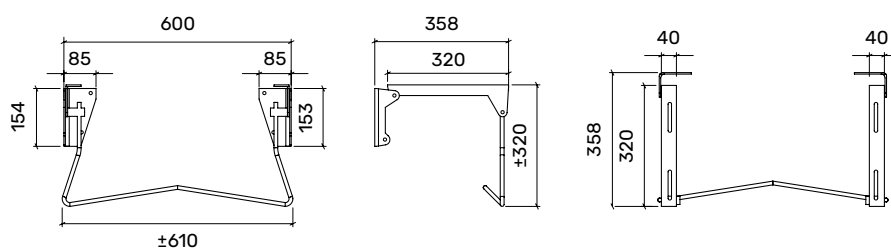

Articolo	Descrizione
----------	-------------

TR0400311	Sifone flessibile con piletta e tubo di scarico per lavabo
------------------	--

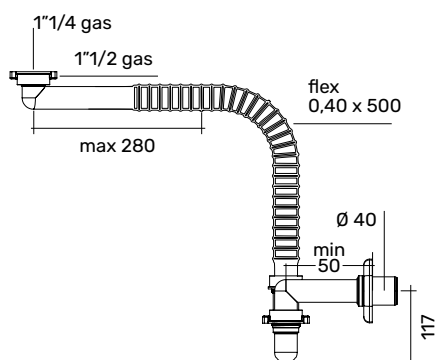


MANIGLIONI VERNICIATI TRINNITY


Quote disegni in mm



Articolo	Descrizione
TR0400312	Maniglione lineare 30 cm - verniciato bianco
TR0400313	Maniglione lineare 38 cm - verniciato bianco
TR0400314	Maniglione lineare 45 cm - verniciato bianco
TR0400315	Maniglione lineare 60 cm - verniciato bianco
TR0400316	Maniglione lineare 80 cm - verniciato bianco
TR0400317	Maniglione lineare 90 cm - verniciato bianco
TR0400318	Maniglione lineare 128 cm - verniciato bianco

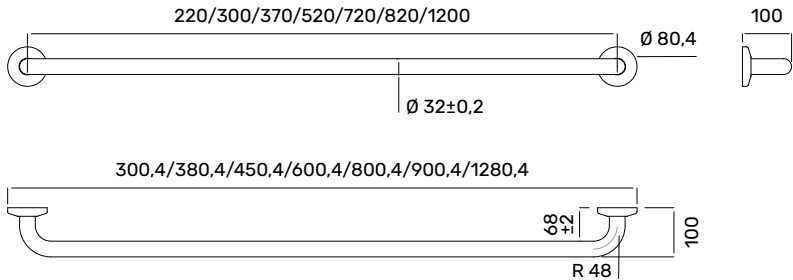


Articolo	Descrizione
TR0400319	Corrimano orizzontale 150 cm con rinforzo centrale - verniciato bianco

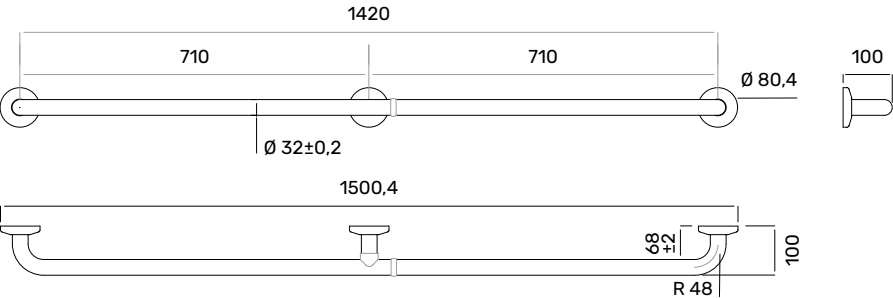


Quote disegni in mm




Articolo	Descrizione
TR0400320	Impugnatura ribaltabile con rinforzo 60 cm - verniciata bianco
TR0400321	Impugnatura ribaltabile con rinforzo 80 cm - verniciata bianco

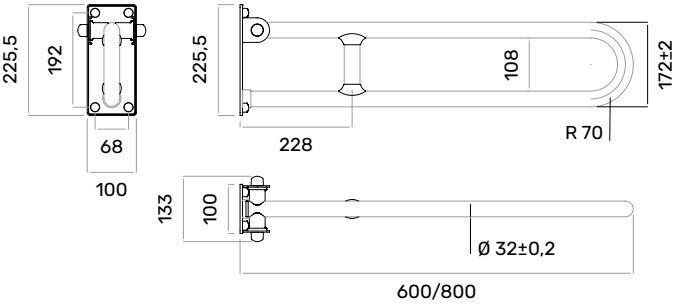

Articolo	Descrizione
TR0400385	Impugnatura ribaltabile con rinforzo 60 cm - con porta rotolo - verniciata bianco
TR0400386	Impugnatura ribaltabile con rinforzo 80 cm - con porta rotolo- verniciata bianco

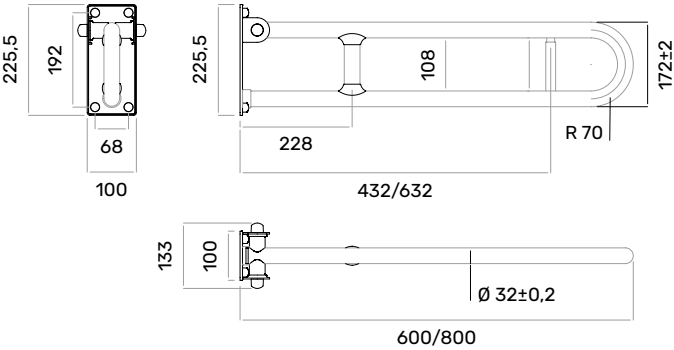



Articolo	Descrizione
TR0400322	Sostegno a "L" 43x74 cm DX - verniciato bianco
TR0400323	Sostegno a "L" 43x74 cm SX - verniciato bianco

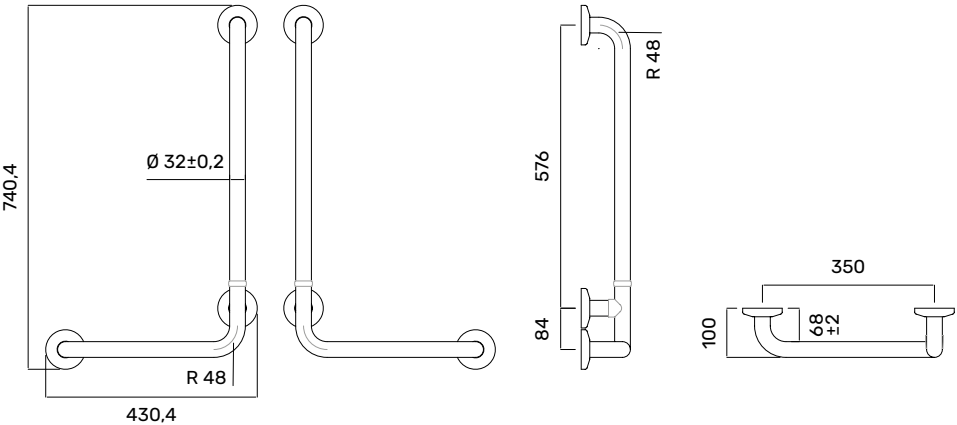


MANIGLIONI VERNICIATI
TRINNITY

Quote disegni in mm

Articolo	Descrizione
TR0400324	Sostegno a "L" 45x126 cm DX - verniciato bianco
TR0400325	Sostegno a "L" 45x126 cm SX - verniciato bianco

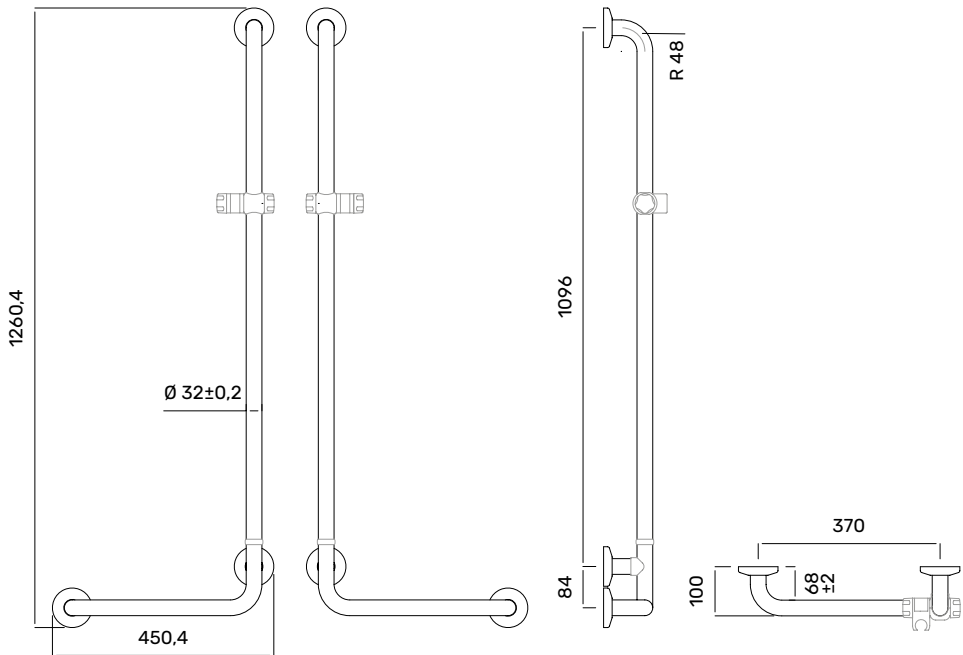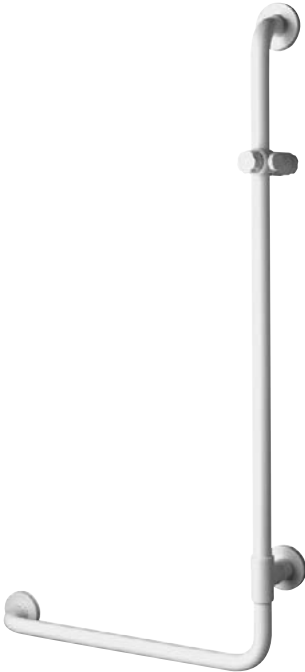


Articolo	Descrizione
TR0400326	Sostegno ad angolo 135° - verniciato bianco

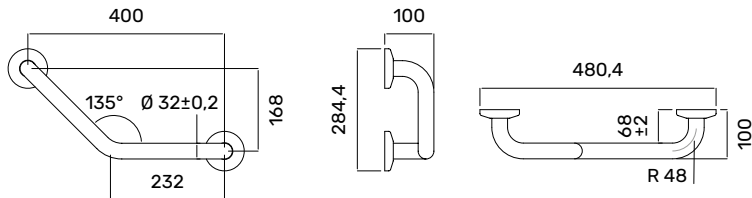


Quote disegni in mm

Articolo	Descrizione
TR0400327	Corrimano orizzontale angolare 70x70 cm - verniciato bianco
TR0400328	Corrimano orizzontale angolare 80x80 cm - verniciato bianco

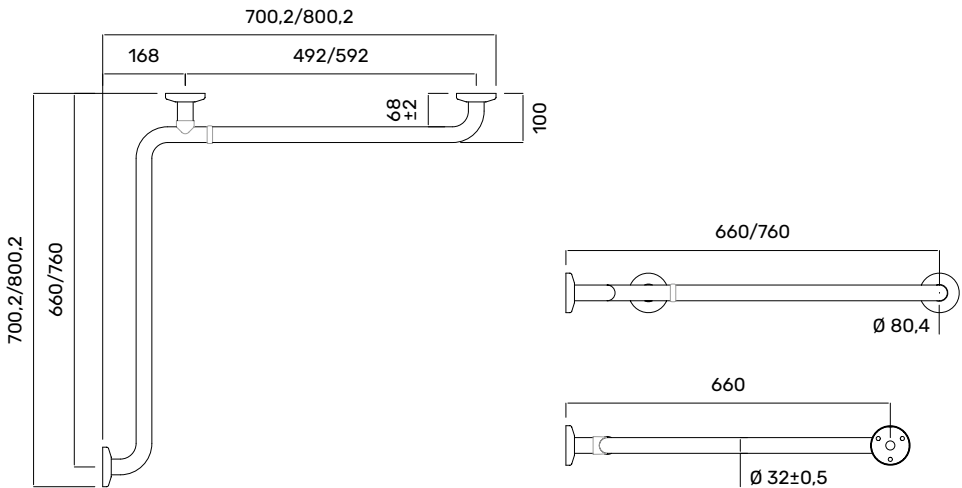

Articolo	Descrizione
TR0400329	Corrimano verticale pavimento-parete H 180 cm - verniciato bianco

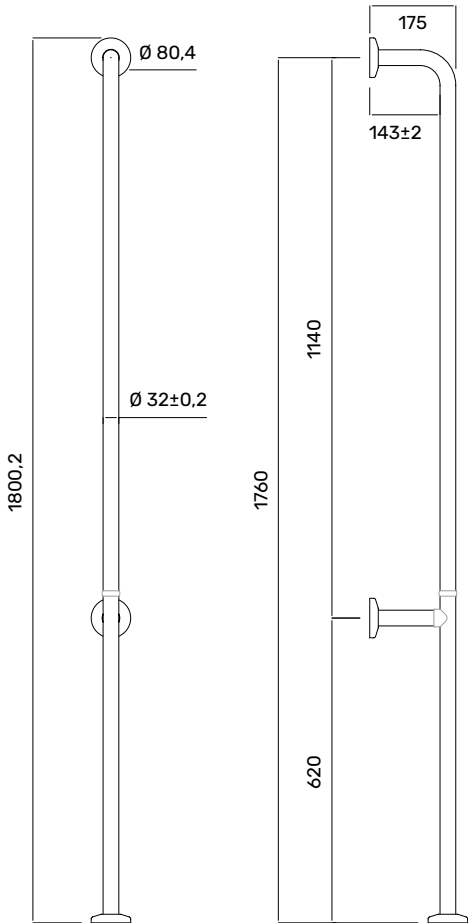


MANIGLIONI RIVESTITI TRINNITY


Quote disegni in mm



Articolo	Descrizione
TR0400330	Maniglione lineare 30 cm - rivestito con guaina antibatterica bianca
TR0400331	Maniglione lineare 40 cm - rivestito con guaina antibatterica bianca
TR0400332	Maniglione lineare 50 cm - rivestito con guaina antibatterica bianca
TR0400333	Maniglione lineare 60 cm - rivestito con guaina antibatterica bianca
TR0400364	Maniglione lineare 70 cm - rivestito con guaina antibatterica bianca
TR0400365	Maniglione lineare 90 cm - rivestito con guaina antibatterica bianca
TR0400366	Maniglione lineare 120 cm - rivestito con guaina antibatterica bianca

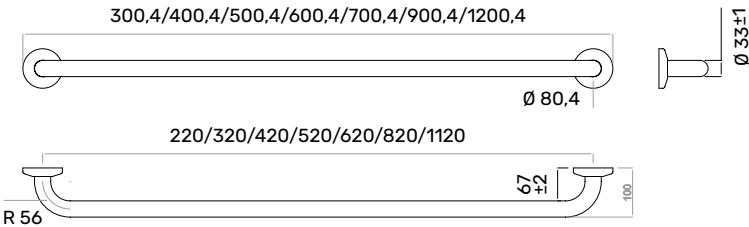


Articolo	Descrizione
TR0400367	Impugnatura ribaltabile 60 cm - rivestita con guaina antibatterica bianca
TR0400368	Impugnatura ribaltabile 80 cm - rivestita con guaina antibatterica bianca

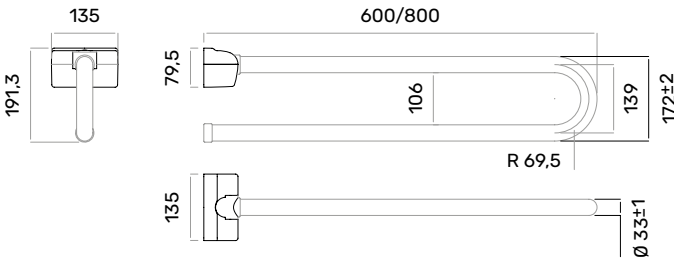


Quote disegni in mm



Articolo	Descrizione
TR0400369	Impugnatura ribaltabile con rinforzo 60 cm rivestita con guaina antibatterica bianca
TR0400370	Impugnatura ribaltabile con rinforzo 80 cm rivestita con guaina antibatterica bianca

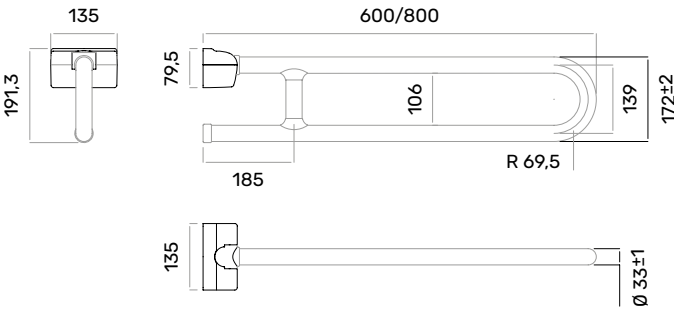


Articolo	Descrizione
TR0400380	Impugnatura ribaltabile con rinforzo 60 cm con porta rotolo rivestita con guaina antibatterica bianca
TR0400391	Impugnatura ribaltabile con rinforzo 80 cm con porta rotolo rivestita con guaina antibatterica bianca

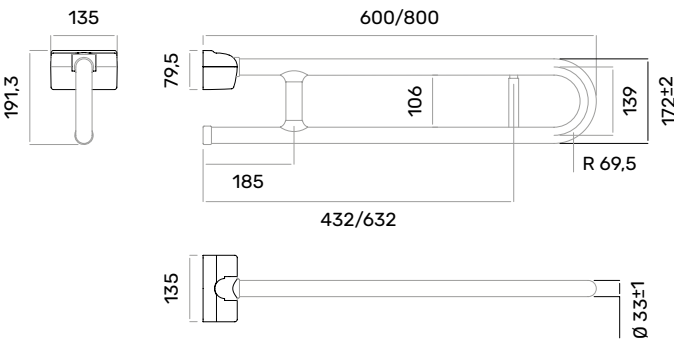


MANIGLIONI
RIVESTITI
TRINNITY



Articolo	Descrizione
TR0400371	Impugnatura ribaltabile con piede 60 cm rivestita con guaina antibatterica bianca
TR0400372	Impugnatura ribaltabile con piede 80 cm rivestita con guaina antibatterica bianca

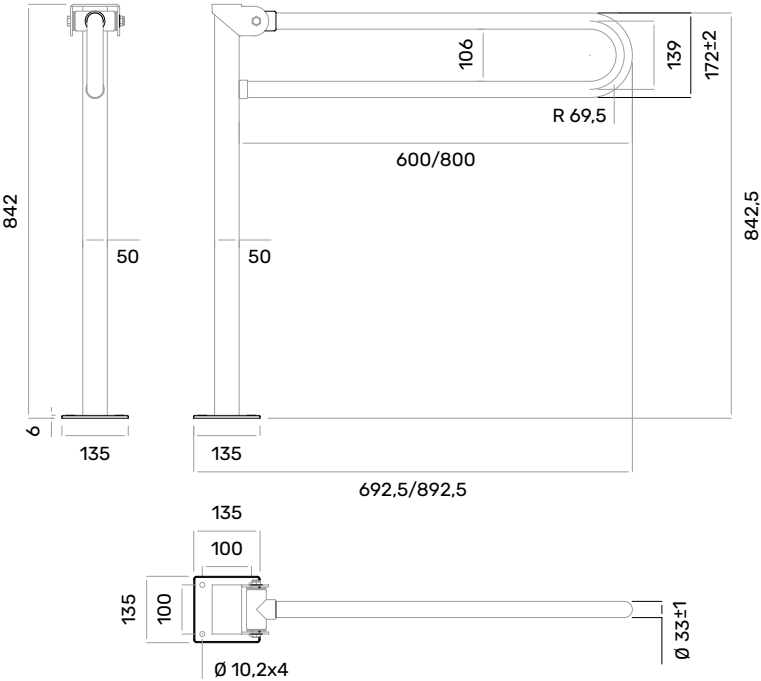


Articolo	Descrizione
TR0400392	Impugnatura ribaltabile con piede 60 cm con porta rotolo rivestita con guaina antibatterica bianca
TR0400393	Impugnatura ribaltabile con piede 80 cm con porta rotolo rivestita con guaina antibatterica bianca

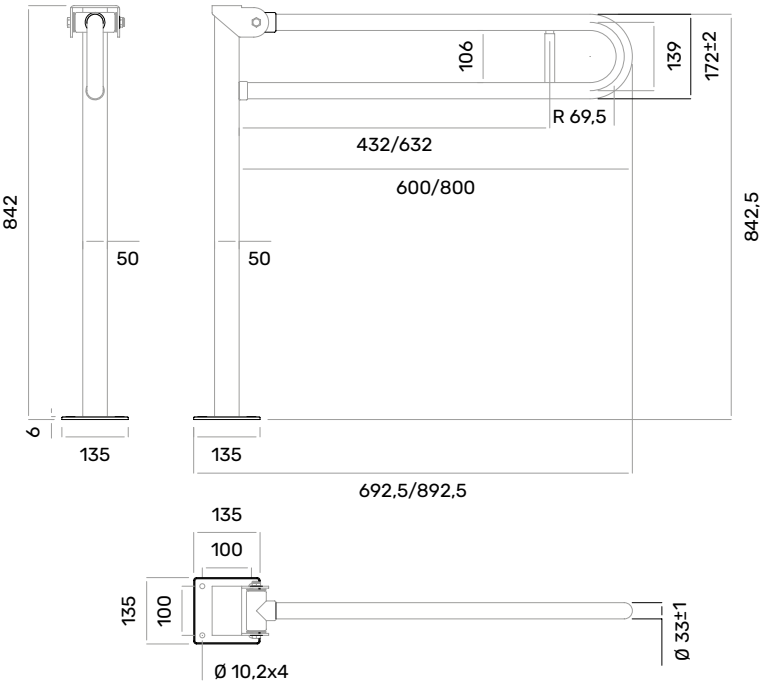


Quote disegni in mm



Articolo	Descrizione
TR0400373	Corrimano verticale pavimento/parete H 140 cm rivestito con guaina antibatterica bianca
TR0400374	Corrimano verticale pavimento/parete H 180 cm rivestito con guaina antibatterica bianca

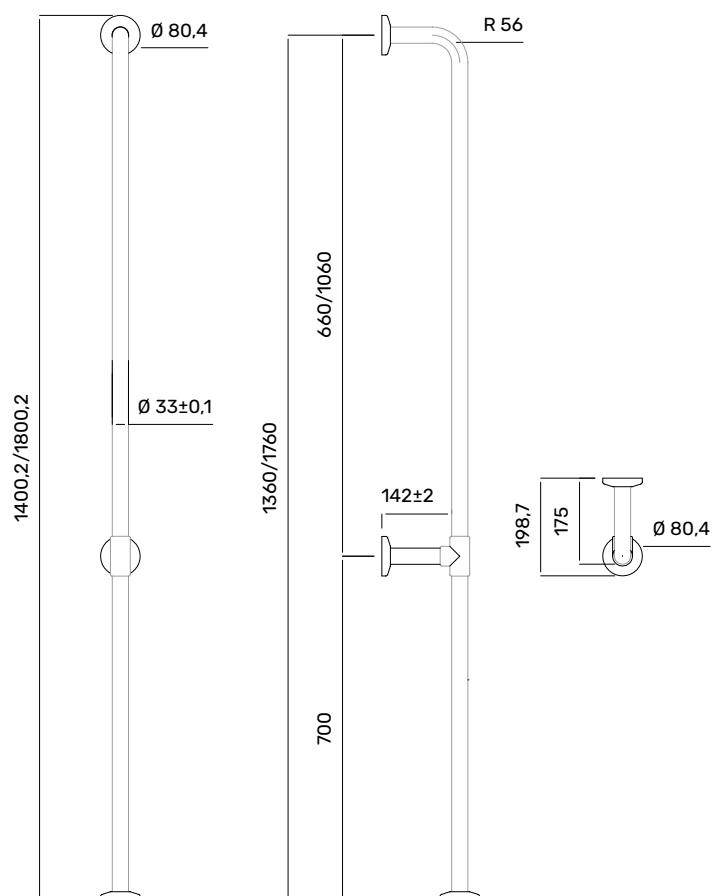


Articolo	Descrizione
TR0400375	Sostegno a "L" 36x66 cm DX - rivestito con guaina antibatterica bianca
TR0400376	Sostegno a "L" 36x66 cm SX - rivestito con guaina antibatterica bianca

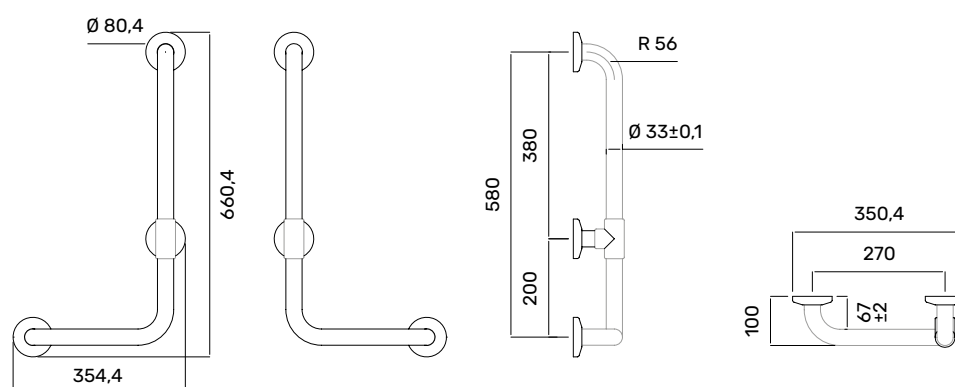

MANIGLIONI RIVESTITI
TRINNITY

Quote disegni in mm


Articolo	Descrizione
TR0400377	Corrimano orizzontale angolare 66x66 cm rivestito con guaina antibatterica bianca
TR0400378	Corrimano orizzontale angolare 76x76 cm rivestito con guaina antibatterica bianca

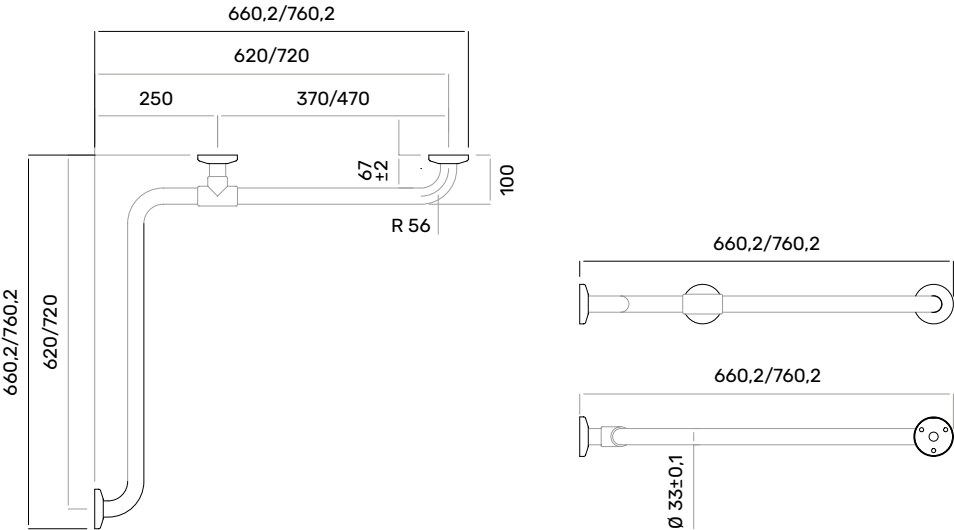

SPECCHI
TRINNITY

Quote disegni in mm

Articolo	Descrizione
TR0400379	Specchio inclinabile 60x45 cm - vetro di sicurezza

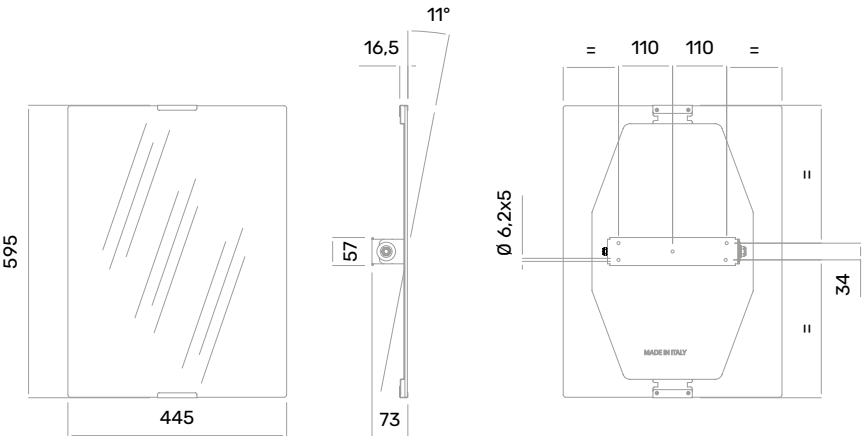


SEDILI DOCCIA/VASCA TRINNITY




Articolo	Descrizione
----------	-------------

TR0400381 Sedile doccia con doghe 40x38 cm portata 150 kg rivestito con guaina antibatterica bianca

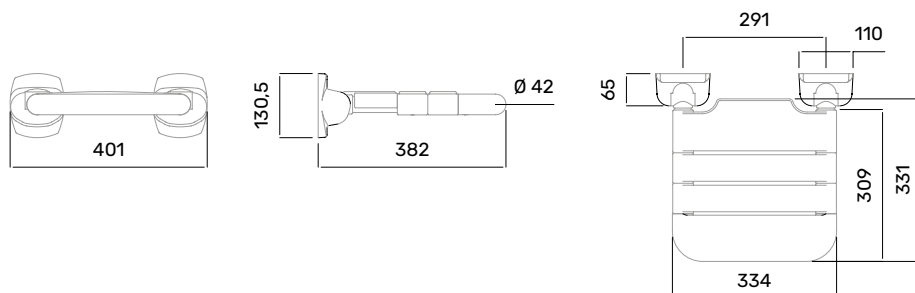


Articolo	Descrizione
----------	-------------

TR0400382 Sedile doccia con schienale 38x33 cm portata 120 kg bianco

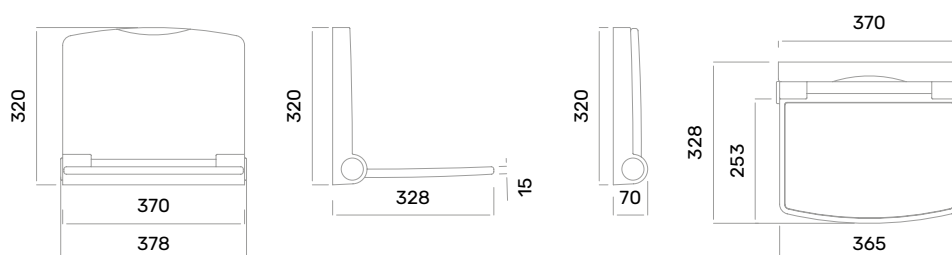


Articolo	Descrizione
----------	-------------

TR0400383 Sedile doccia Abs asportabile 33x32 cm portata 150 kg rivestito con guaina antibatterica bianca

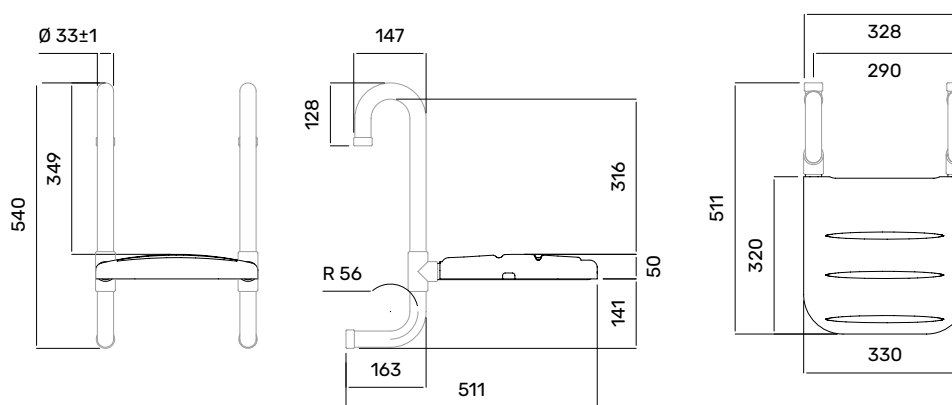

Articolo	Descrizione
----------	-------------

TR0400384 Sedile vasca ABS rimovibile 31x31 cm portata 150 kg bianco

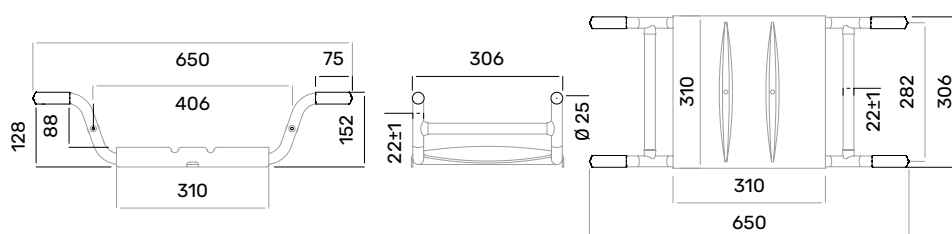

INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI AUSILI A PARETE TRINNITY


Flangia di fissaggio

Tipologie di prodotto in cui questo sistema viene utilizzato:

- maniglioni
- sostegni di sicurezza per angolo
- sostegni di sicurezza ad angolo
- sostegni laterali fissi
- corrimano.

Flangia 4 fori per maniglioni Trinnity rivestiti e verniciati

- Poliammide 6
- Caricato fibra di vetro
- Ø 77 mm


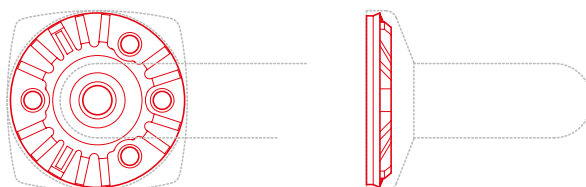


Ancoraggi suggeriti in base alla tipologia di parete

Si ricorda che l'installazione degli ausili deve essere eseguita esclusivamente da personale esperto e qualificato. A tale personale spetta anche la scelta dei sistemi di fissaggio più adatti, in base al tipo di parete su cui l'ausilio verrà montato.

L'installatore dovrà inoltre verificare che la superficie della parete, lungo tutta l'area di contatto con la flangia, sia perfettamente liscia e priva di dislivelli, come fughe o piastrelle sporgenti. È fondamentale accertarsi che la struttura della parete sia idonea a sostenere l'ausilio e che non presenti punti deboli o zone compromesse.

La responsabilità sulle dovute verifiche e sul montaggio degli ausili resta in carico all'installatore.

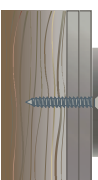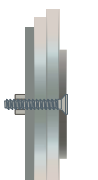Tipologia di parete	Tassello suggerito		
Calcestruzzo		Tasselli tipo "SX8" Fischer Viti per truciolare TSP 6x70 Inox	Forare con punta Ø 8 mm
Blocchi di "Gasbeton" Pietra naturale leggera		Tasselli tipo "SX8" Fischer Viti per truciolare TSP 6x70 Inox	Forare con punta Ø 8 mm
Mattoni forati in laterizio		Tasselli tipo "SX8" Fischer Viti per truciolare TSP 6x70 Inox	Forare con punta Ø 8 mm Eseguire foro con sola rotazione evitando la roto-percussione
Mattoni pieni in laterizio Pietra naturale compatta		Viti per truciolare TSP 6x70 Inox	Forare con punta Ø 8 mm
Cartongesso Compensato o laminati Accoppiate in piastra di fissaggio in legno o multistrato spessore 20 mm Installata tra i montanti o contro parete		Tasselli tipo "SX8" Fischer Viti per truciolare TSP 6x70 Inox	Forare con punta Ø 8 mm
Cartongesso Compensato o laminati Accoppiate in piastra di fissaggio in acciaio. Installata tra i montanti o contro parete		Viti TSP M8x60 Inox DIN 965 A2	Forare con punta Ø 8 mm La caricabilità effettiva del sistema dipende dallo spessore della lastra

INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI AUSILI A PARETE TRINNITY


Piastre di fissaggio

Tipologie di prodotto in cui questi sistemi vengono utilizzati:

- sostegni ribaltabili
- sedili ribaltabili.


Piastra "estesa" per maniglioni Trinnity ribaltabili verniciati

- Inox lucido
- Acciaio Inox Aisi 304
- L 94,5 x A 220 mm

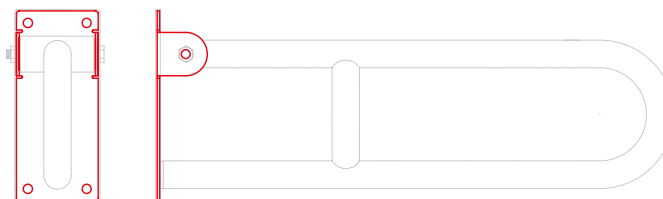


Piastra "ridotta" per maniglioni Trinnity ribaltabili rivestiti

- Acciaio Inox Aisi 304
- L 95,7 x A 60 mm

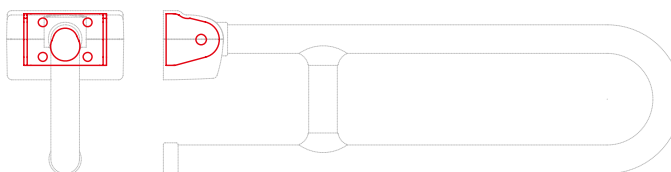

Piastra "ridotta" per sedile Trinnity TR0400381

- Acciaio Inox Aisi 304
- L 83,5 x A 115 mm






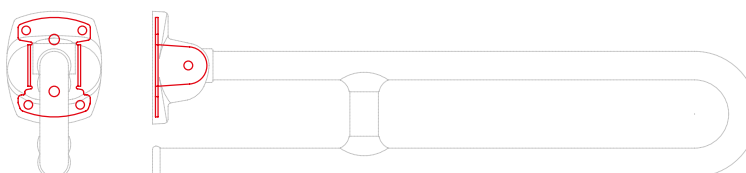


Ancoraggi suggeriti in base alla tipologia di parete

Si ricorda che l'installazione degli ausili deve essere eseguita esclusivamente da personale esperto e qualificato. A tale personale spetta anche la scelta dei sistemi di fissaggio più adatti, in base al tipo di parete su cui l'ausilio verrà montato.

L'installatore dovrà inoltre verificare che la superficie della parete, lungo tutta l'area di contatto con la flangia, sia perfettamente liscia e priva di dislivelli, come fughe o piastrelle sporgenti. È fondamentale accertarsi che la struttura della parete sia idonea a sostenere l'ausilio e che non presenti punti deboli o zone compromesse.

La responsabilità sulle dovute verifiche e sul montaggio degli ausili resta in carico all'installatore.

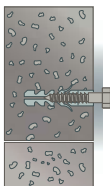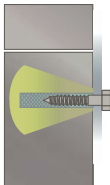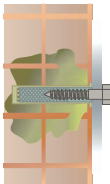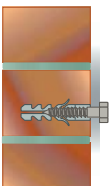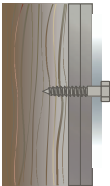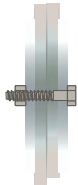Tipologia di parete	Tassello suggerito		
Calcestruzzo		Tasselli tipo "S14W" Fischer Viti TE 10x90 DIN 571 Inox	Per piastre con fori Ø 10 mm eseguire foro Ø 14 mm
Blocchi di "Gasbeton" Pietra naturale leggera		Bussola tipo "FIP 14x80 M10i" Fischer Viti TSPCE M 10x30 DIN 7991	Forare con punta conica PBB, iniettare resina tipo "Fischer FIS V o FIS VS"
Mattoni forati in laterizio		Bussola tipo "FIP 14x80 M10i" Fischer Tasselli a rete tipo "FIP 20x85 R" Fischer Viti TSPCE M 10x30 DIN 7991	Forare con punta Ø 20 mm con sola rotazione, evitando la rotopercolazione Iniettare resina tipo "FIS V o FIS VS" Fischer
Mattoni pieni in laterizio Pietra naturale compatta		Bussola tipo "FIP 14x80 M10i" Viti TSPCE M 10x30 DIN 7991	Forare con punta Ø 16 mm Iniettare resina tipo "FIS V o FIS VS" Fischer
Cartongesso Compensato o laminati Accoppiate in piastra di fissaggio in legno o multistrato spessore 20 mm Installata tra i montanti o contro parete		Tasselli tipo "SX8" Fischer Viti per truciolare TSP 6x70 Inox	Eseguire foro guida con punta Ø 7 mm
Cartongesso Compensato o laminati Accoppiate in piastra di fissaggio in acciaio. Installata tra i montanti o contro parete		Viti TBCE classe 10.9 M 10x80 ISO 7380	Forare con punta Ø 8 mm La caricabilità effettiva del sistema dipende dallo spessore della lastra.

AGEVOLAZIONI FISCALI

La Legge n° 13 del 1989 consente diverse agevolazioni per la costruzione o la ristrutturazione di un bagno per persone con disabilità.

I contributi sono rivolti a chi desidera eliminare le barriere architettoniche e acquistare prodotti specifici come ausili, maniglioni, vasche a sportello e sanitari, sia in edifici pubblici che in abitazioni private.

Grazie a questa legge è possibile facilitare la vita a chi ha problemi di deambulazione, utilizza la sedia a rotelle o soffre di cecità.

Le agevolazioni sono concessi a portatori di handicap, invalidi, non vedenti e a chi presenta disabilità fisiche permanenti che riducono la mobilità.

Per avviare la procedura bisogna presentare apposita domanda al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno, allegando i seguenti documenti:

- certificato medico che attesti la disabilità e riporti le patologie che causano difficoltà motoria permanente (o certificazione Asl con attestazione di invalidità)
- descrizione dei lavori, indicazione degli ostacoli da eliminare nell'edificio e indirizzo di residenza del richiedente
- comunicazione di fine lavori e fatture relative alle spese sostenute.

I primi documenti devono essere inoltrati insieme alla richiesta di contributo prima dell'inizio dei lavori.

La comunicazione di fine lavori e le fatture vanno presentate una volta terminati gli interventi.

Prima della conferma, l'amministrazione comunale effettuerà un sopralluogo per verificare che i lavori non siano già stati effettuati e per stimare l'entità dell'agevolazione.

Le risorse disponibili sono stanziare annualmente dalle Regioni.

È inoltre possibile usufruire dell'Iva agevolata al 4% e di detrazioni Irpef fino al 50%, in base alla tipologia di intervento eseguito.

Dopo la presentazione della domanda al Comune, la verifica della documentazione e il rispetto di tutti i requisiti, sarà possibile avviare i lavori.

I tempi di erogazione del contributo possono variare: il richiedente deve anticipare le spese e presentare richiesta di rimborso.

Una volta conclusi i lavori e inviate le fatture, il Comune – a seguito dell'autorizzazione regionale – provvederà all'erogazione del contributo, generalmente entro uno o due anni.

TRINNITY RIVENDITORI ESCLUSIVISTI

Presso i rivenditori esclusivisti Trinnity è disponibile un team di esperti pronti a guidare nella scelta più adatta alle varie esigenze. In ognuno dei punti vendita partner è possibile scoprire la qualità dei prodotti e l'affidabilità del servizio con consulenze personalizzate, supporto tecnico dedicato e massima cortesia. La competenza dei rivenditori garantisce un'assistenza approfondita, basata sulla conoscenza del comfort e dell'efficienza che contraddistinguono i prodotti Trinnity.



Pressiani S.r.l.
Via Alfredo Pizzoni, 5/7
20151 Milano
Tel: 039 991191

www.pressianisrl.it
Email: info@pressianisrl.it
Pec: pressianisrl@pec.it
P. Iva: 10090680967



Svai S.r.l.
Via dell'Artigianato, 58
37066 Caselle di
Sommacampagna (VR)
Tel: 045 8581300

www.svai.it
Email: marketing@svai.it
Pec: svaivr@legalmail.it
P. Iva: 04679180234



Rossi & Lersa S.r.l.
Via Stelvio, 93
23020 Poggiridenti (SO)
Tel: 0342 564222

www.rossielersa.it
Email: info@rossielersa.it
Pec: rossielersa@pec.it
P. Iva: 01056620147



Termomarket S.r.l.
Via Piave, 34
20821 Meda (MB)
Tel: 0362 34831

www.termomarketsrl.it
Email: meda@termomarketsrl.it
Pec: termomarketlombardia@fcpacert.it
P.Iva: 12133140967



Carboni ITS S.r.l.
Via Mandrio, 1/B - 1/D
42015 Correggio (RE)
Tel: 0522 633211

www.carboni.com
Email: carboni@carboni.com
Pec: pec@pec.carboni.com
P. Iva: 02947040354



Idroterm S.r.l.
Via Canonico Rossi, 15
12100 Cuneo (CN)
Tel: 0171 410500

www.idroterm.com
Email: idroterm@idroterm.com
Pec: idroterm@actaliscertymail.it
P. Iva: 04085350041



Commerciale Veneta
Beltrame S.r.l.
Viale della Repubblica, 282
31100 Treviso
Tel: 0422 696311

www.cvbeltrame.it
Email: servizio.vendite@cvbeltrame.it
Pec: cvbeltramesrl@legalmail.it
P. Iva: 05500990261



